

# Spray Détergent Désinfectant Sans Alcool STERICID DDSA

**Formule sans alcool et sans parfum destinée au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces et matériaux sensibles (plexiglass, surfaces modernes,...) en milieu hospitalier et alimentaire.**

## Conditionnement

Spray 750ml avec dispenser moussant.  
Carton de 6 sprays.

## Composition :

Chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS 7173-51-5) : 4.16g/l.

## Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté (sauf \*)

- Bactéricide EN1276, EN13697 en 5 min.
- Fongicide : EN1650, EN13697 en 15mn.
- Tuberculocide (\*) sur mycobactérium terrae selon méthode DGHM en 30mn.
- Virucide (\*) selon EN14476 sur Avian Influenza Virus H3N8/H5N1 (10mn), Influenza A / H1N1 (15mn), Adenovirus (30mn), Polyovirus, HIV, HBV, HCV (120mn).
- Virucide (\*) selon méthode BGA et DVD sur ECBO et Norovirus en 30mn, et sur Rotavirus et Vaccina en 15mn.

## Mode d'emploi

Pulvériser STERICID DDSA sur la surface à désinfecter à une distance d'environ 30 cm.  
Appliquer et laisser agir au minimum 5 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée. Bien répartir le produit. Essuyer avec une microfibre douce ou de la cellulose.  
Ne laisse aucun résidu. Le rinçage est inutile sauf si le produit est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

## Précautions d'emploi :

Utiliser ce biocide avec précautions.  
Ne pas mélanger à d'autres produits.  
Porter des gants de ménage.  
En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

Produit étiqueté selon le règlement CE 1272/2008 (CLP) : Aucun pictogramme de danger.

Biocide TP2 et TP4.

Réf : DDSA



Fiche Technique. Version 1- 11/2015

STERIDIS - ZAC de la Blanche Tâche - 80450 CAMON  
Tél : 03 22 09 41 39 - Fax : 03 22 50 01 34 - mail : contact@steridis.com