

ANIOSYME DD1

Détergent
pré-désinfectant
de l'instrumentation



- Formule brevetée
- Premier détergent liquide tri-enzymatique avec propriétés désinfectantes
- Destiné au ramassage de l'instrumentation souillée : absence de contamination croisée

INDICATIONS

- Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique.
- Nettoyage en bacs à ultra-sons.
- Ramassage de l'instrumentation souillée.

CARACTERISTIQUES

- Premier détergent liquide enzymatique avec propriétés désinfectantes.
- Complexe tri-enzymatique : protéase, lipase, amylase, combiné à des surfactants.
- Efficacité démontrée (PND*) * Pouvoir Nettoyant Dégraissant.
- Formulé sans chlore : pas d'oxydation des matériaux.
- Formulé sans aldéhyde : pas de fixation des protéines.
- Stabilité du bain de trempage : 8 heures (journée opératoire).
- Stabilité enzymatique prouvée.
- pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium.
- Formulé sans chlorure (produit sur base de propionate d'ammonium) : effet anticorrosif vis-à-vis des matériaux.
- Compatible avec les ultra-sons.
- Liquide limpide bleu parfumé.

PRODUIT
A DILUER
25 ml > 5L



0,5%
5 min.



ANIOSYME DD1

Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation


MODE D'EMPLOI



1

Dilution à 0,5 % :

Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.

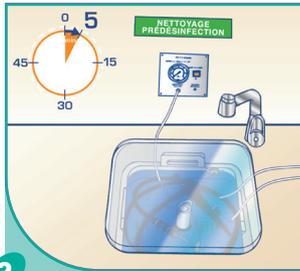


2

Immerger complètement le dispositif médical.

Temps de trempage conseillé : 5 min.


Brosser si nécessaire.
Pour le matériel endoscopique :
Double nettoyage 10 + 5 minutes
Ecouvillonner

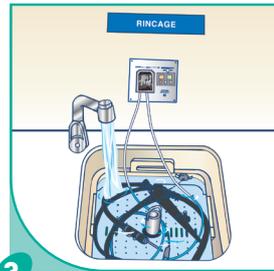

3

Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau de réseau (de bonne qualité microbologique).

Pour le matériel endoscopique :
l'extérieur et l'intérieur
du dispositif médical.

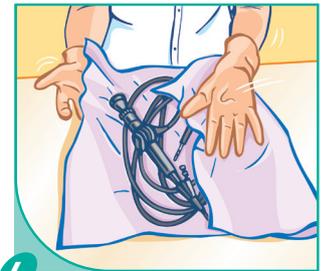

4

Essuyer avec un champ propre. Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement).

COMPOSITION

Propionate d'ammonium quaternaire, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), surfactants, agents stabilisants, séquestrant, parfum, colorant.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (Établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Stockage : de +5°C à + 35°C.

Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

CONDITIONNEMENTS

- 1 Carton de 200 doses de 25 ml.....Réf. 1200.097
- 2 Carton de 12 flacons de 1 litre avec doseur incorporé.....Réf. 1200.095
- 3 Carton de 4 bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 25 ml.....Réf. 1200.036

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727 (conditions de saleté : albumine et érythrocytes SARM [EN 13727])	5 minutes
Mycobactéries	Mycobacterium tuberculosis (B.K.)	5 minutes
Levures	EN 1275, EN 13624	5 minutes
Virus	HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, Influenza virus A [H1N1], Vaccinia virus	5 minutes

