

# Mepilex® Border

## MOUSSE SILICONÉE SAFETAC, AUTO-ADHÉRENTE ET ABSORBANTE

- Son absorptivité supérieure favorise l'équilibre hydrique optimal et réduit le risque de macération
- Trauma et douleur minimales quand on renouvelle le pansement
- La pellicule résiste aux virus, aux bactéries et à l'eau pour protéger patients et cliniciens

### Pellicule externe à perméabilité dynamique

- Absorptivité supérieure
- À l'épreuve des virus, des bactéries et de l'eau
- Mince et souple; faible coefficient de frottement, fixation solide

### Mousse améliorée, régulatrice d'humidité

- Construction stratifiée perfectionnée
- Absorption optimale des liquides
- Conserve son intégrité
- Épouse les formes
- Favorise l'équilibre hydrique optimal



### Couche de silicone molle Safetac®


- Fixation solide
- Le pansement s'enlève sans endommager la plaie ou la peau péri-lésionnelle
- Réduit le risque de macération

**Safetac**  
TECHNOLOGIE


### Technologie Safetac

#### Technologie Safetac. Moins de trauma. Moins de douleur.

Safetac est une technologie brevetée d'enduction de la silicone. Les pansements issus de la technologie Safetac sont atraumatiques pendant le port et le retrait. Ils minimisent les traumas sur la plaie et la peau, ce qui réduit la douleur. Ils préviennent aussi la macération en formant un sceau sur la plaie, ce qui protège la zone péri-lésionnelle.

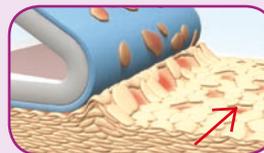

Arrachement de l'épiderme sous un adhésif traditionnel

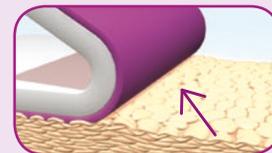


Pas d'épiderme arraché sous Safetac


## Mode d'action de Mepilex Border

Mepilex Border est une mousse auto-adhérente à l'absorptivité supérieure, à perméabilité dynamique, dotée de tous les avantages de la silicone molle SafetaC. Elle adhère délicatement à la peau péri-lésionnelle sans coller aux plaies humides. Cela réduit au minimum la douleur et les traumatismes aux plaies et à leur pourtour. Ce pansement imperméable résiste aux virus et aux bactéries. Son coussinet stratifié favorise un équilibre hydrique optimal et une excellente absorption.

## Application de Mepilex Border

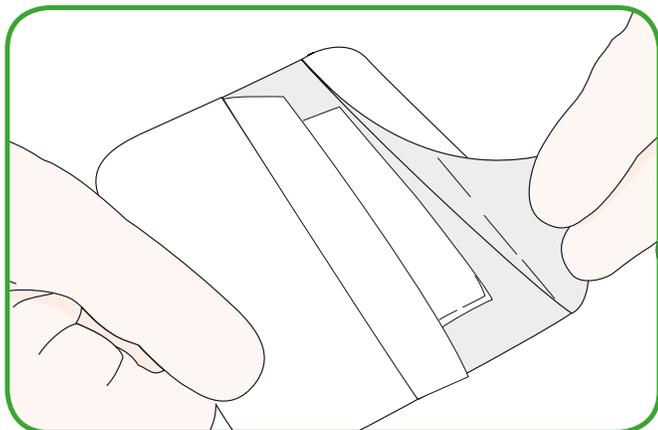

1. Nettoyer délicatement la plaie ; assécher le pourtour. Choisir un pansement assez grand pour déborder la plaie d'au moins 2 cm. Retirer la pellicule anti-adhérente.

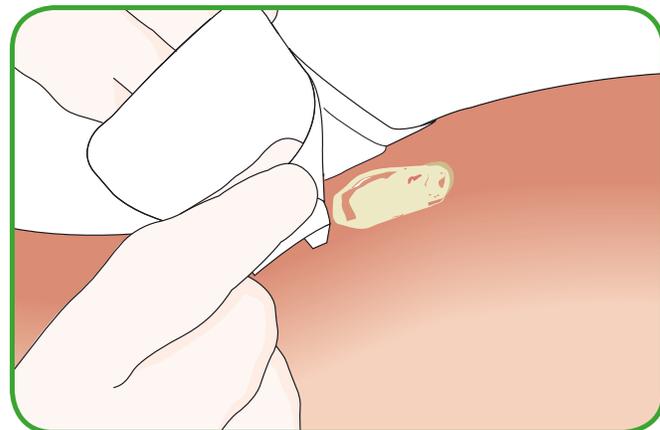

2. Poser la mousse sur la plaie. Lisser la bordure adhésive. Ne pas étirer. Mepilex Border peut demeurer en place jusqu'à 7 jours, selon le niveau d'exsudat et l'état de la plaie.

## Mepilex Border



## Indications

Mepilex Border est un pansement polyvalent qui convient à diverses plaies :

- Ulcères de jambe
- Plaies douloureuses
- Plaies de pression
- Plaies au pourtour fragilisé
- Plaies chirurgicales
- Mepilex Border s'utilise comme pansement primaire des plaies superficielles ou comme pansement secondaire des plaies profondes. Idéal pour les plaies modérément ou copieusement exsudatives.

## Avantages de Mepilex Border

- Aucune fixation requise
- À l'épreuve des virus, des bactéries et de l'eau
- Ne colle pas aux plaies humides
- Peut demeurer en place jusqu'à 7 jours, selon l'état de la plaie et la quantité d'exsudat
- Entretient un milieu humide sur la plaie
- Épouse les formes du corps

### Sélection Mepilex Border

N° réf.	Taille cm	Qté/boîte	Qté/caisse
295200	7,5 x 7,5	5	70
295300	10 x 10	5	50
295000	12,5 x 12,5	5	50
295400	15 x 15	5	50
295600	15 x 20	5	45
295800	10 x 20	5	35
295900	10 x 30	5	25