




KIT DE PROTECTION PERSONNEL SOIGNANT

Fiche Technique HOSTO-MANCH

Paire de manchettes (obligatoirement avec sur-blouse page 2)

- ✓ **Kit de protection : une sur-blouse plus une paire de manchettes**
- ✓ **Paire de manchettes liées par une bande plastique**
- ✓ **Une épaisseur renforcée : plus de solidité, plus d'étanchéité et protection face aux projections**

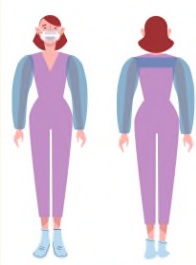

Caractéristiques		Impression des sacs		Visuel produit	
Type	Manchette de protection	Libellé impression	Sans	  Photo non contractuelle	
Dimensions 1 manchette (lxL)	260x750 mm (+/- -2,5%)				
Epaisseur	30 μ (+/- -8%)				
Couleur	Translucide teinté bleu				
Type de lien	sans	Type d'impression	Non		
Type de sac	-	Couleur d'impression			
Type de soudure	Traditionnelle				
Bande Papier	Oui / non personnalisée				
Composition		PROTOCOLE D'UTILISATION MANCHETTE			
PE Basse Densité		Les mettre: 1) Retirer la partie prédécoupée au centre. 2) Glisser les bras dans les 2 manchettes. 3) Passer la bande plastique derrière la tête			
Logistique		Les retirer: 1) Déchirer la bande plastique dans le dos en tirant dessus. 2) Retirer les manchettes de l'épaule vers le poignet en les retournant.			
		<i>Voir mode d'emploi</i>			
		Certifications			
					
IMPORTANT		Secteur d'utilisation			
Sur-blouse et paire de manchettes sont livrables à quantités égales soit 1 carton de sur-blouses + 1 carton de paires de manchettes		 Santé			



KIT DE PROTECTION PERSONNEL SOIGNANT

Fiche Technique HOSTO-SURBL

Sur-blouse

(obligatoirement avec paire de manchettes page 1)

- ✓ Kit de protection : une sur-blouse plus une paire de manchettes
- ✓ Une blouse intégrant un trou pour la tête et des prédécoupes latérales pour les bras
- ✓ Une épaisseur renforcée : plus de solidité, plus d'étanchéité et protection face aux projections



Caractéristiques

Type	Sur-blouse de protection
Dimensions (l x h)	800x1300 mm (+/- 2,5%)
Epaisseur	35 µ (+/- 8%)
Couleur	Translucide teinté bleu
Type de lien	sans
Type de sac	-
Type de soudure	Traditionnelle
Bande Papier	Oui / non personnalisée

Impression des sacs

Libellé impression	Sans
Type d'impression	Non
Couleur d'impression	

Visuel produit

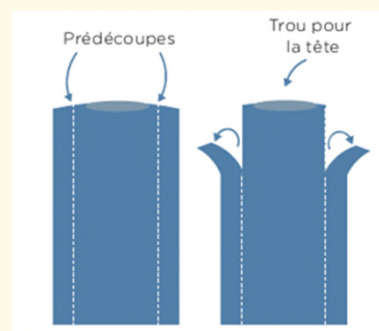


Photo non contractuelle

Composition

PE Basse Densité

Logistique

EAN CODE	03700036021587
Conditionnement	10 rouleaux de 20 soit 200 sur-blouses
Dimensions du carton	445X250X200
Nb cartons/couche	7
Nb cartons/palette	49
Nb couches/palette	7
Nb produits /palette	9800 Sur-blouses
Dimensions palette Palette Europe avec échange	800x1200 mm

PROTOCOLE D'UTILISATION SUR-BLOUSE

Enfiler la blouse :

- 1) Déchirer les prédécoupes présentes sur les côtés sur 20 à 25cm pour créer 2 trous pour les bras
- 2) Passer la tête dans l'ouverture.
- 3) Passer les bras dans les trous et ajuster au niveau des épaules.

Retirer la blouse :

- 1) Déchirer la prédécoupe à droite ou à gauche en tirant dessus
- 2) Retirer la sur-blouse en tirant impérativement vers l'avant et vers le bas

Voir mode d'emploi

Certifications



Secteur d'utilisation



Santé

IMPORTANT

Sur-blouse et paire de manchettes sont livrables à quantités égales soit 1 carton de sur-blouses + 1 carton de paires de manchettes