


Abri-Form Premium XL4

INCONTINENCE

ABRI FORM Premium



110 - 170 cm

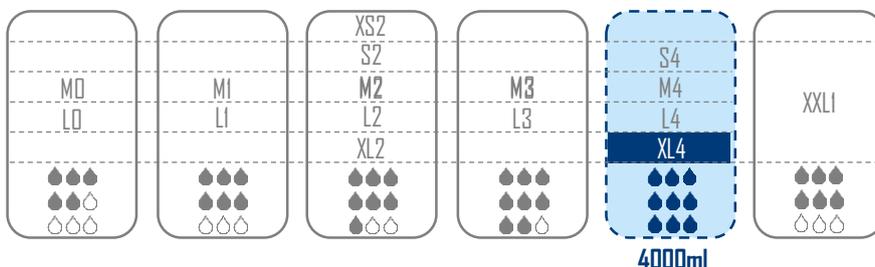

UTILISATEURS

SEMI-AUTONOME

ALITÉ

INCONTINENCE LOURDE



Top Dry – Couche d'acquisition pour effet garde-au-sec

La couche d'acquisition est située entre le coussin absorbant et le voile externe supérieur. Elle se compose d'un alliage de fluff et non-tissé. Sa fonction est d'améliorer l'absorption rapide du liquide et de favoriser sa répartition sur une zone plus large, ralentissant ainsi la saturation du change. Hydrophile, la couche d'acquisition laisse pénétrer le liquide mais l'empêche de ressortir, permettant ainsi à la surface interne du change de rester sèche.



Système anti-odeurs

Les agents super absorbants (SAP) absorbent le liquide et capturent les odeurs à l'intérieur du change.



Barrières anti-fuites

Les barrières anti-fuites hydrophobes sont situées au niveau des jambes et permettent un ajustement parfait du change à la morphologie de l'utilisateur.



Air Plus – Voile externe respirant

Le voile externe (BTBS) laisse la peau respirer, garantissant son intégrité et limitant les risques de dermatites associées à l'incontinence.



Adhésifs extensibles et repositionnables

Les adhésifs extensibles offrent un confort d'utilisation optimal pour un ajustement parfait à la morphologie de l'utilisateur. Repositionnables, ils ne déchirent pas la protection une fois retirés.



Témoin de saturation


Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide. L'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation facilement.

Abri-Form Premium XL4

DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% fluff de cellulose non blanchi au chlore (ECF free)
Sous-couche	Couche d'acquisition, non-tissé blanc
Non-tissé	Polypropylène (PP), hydrophile permanent
Barrières	Polypropylène (PP), non-tissé hydrophobe
Elastiques	Elasthanne, sans latex
Voile externe	Voile externe textile respirant (BTBS, Breathable Backsheet)
Adhésif (colle)	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates
SAP	Super absorbant, polyacrylate, sans phtalates
Marquages	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.

DIMENSIONS PRODUIT

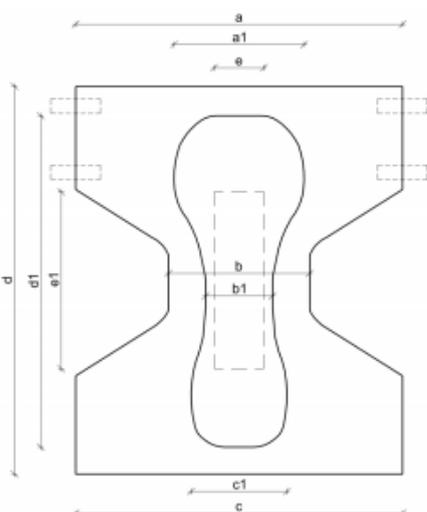

d	Longueur	970 mm
a	Largeur, devant	850 mm
c	Largeur, arrière	850 mm
b	Largeur, entre-jambes	265 mm

Cœur absorbant

dl	Longueur	800 mm
al	Largeur, devant	360 mm
cl	Largeur, arrière	380 mm
bl	Largeur, entre-jambes	180 mm

Sous-couche (ADL)

el	Longueur	400 mm
e	Largeur	100 mm

ABSORPTION

Poids produit : 190g

Test Rothwell ISO 11948-1	4000 ml
Absorption Méthode Hy-tec PA02/02	1965,71g
Temps d'absorption Méthode Hy-Tec PA02/03	7,27 ml/s
Rewet Méthode Hy-Tec PA02/04	0,18g



Dispositif médical
Classe I 93/42/CEE



Ecolabel Nordic Swan
Produits respectueux de
l'utilisateur et de son
environnement



Testé dermato-
logiquement
Produits sans risques d'irritation



ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001:2008

Management de la santé
et de la sécurité au
travail



GMP
Good Manufacturing
Practices



Abri-Form Premium XL4



DONNÉES LOGISTIQUES

Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton	
4	12	48	
Cartons / Palette	Hauteur palette	Cartons / Palette gerbée	
12	1,326 m	24	
EAN Sachet		EAN Carton	
57 03538 759970		57 03538 759994	
Dimensions carton	Poids brut carton	Poids net carton	Dimensions sachet
61,6 x 39,6 x 39,2 cm	10 019 g	9 168 g	38 x 18 x 30 cm

GUIDE D'UTILISATION

POSITION COUCHÉE



- Former une gouttière en pliant le change sur sa longueur. Ne pas toucher l'intérieur de la protection.
- Placer le résident sur son côté. A - Positionner la protection, « gouttière » en main, entre les jambes. B - Ajuster la face arrière du change.
- Utilisateur sur le dos. Ajuster la face avant du change. Rabattre les flans arrière sur la partie avant et fixer les attaches du bas. S'assurer que le change soit maintenu étroitement sur le corps.
- A - Fixez les attaches hautes en les orientant vers le bas. B - Ajuster les bords autour de l'aîne.

POSITION DEBOUT



- Toujours veiller à faire la gouttière. S'assurer que le résident soit bien en appui. Glisser la protection, « gouttière » en main, entre les jambes.
- Maintenir la partie arrière de la protection avec la jambe. Tirer la face avant du change. Fixer les attaches basses sur la face avant.
- Fixer les attaches hautes en les orientant vers le bas. Ajuster les bords du change autour de l'aîne.

PRODUITS ASSOCIÉS



Découvrez la gamme complète de soins de la peau et d'essuyage corporel ABENA

www.abena-frantex.fr

