

UrgoTul Absorb



Pansement absorbant lipido-colloïde micro-adhérent

Urgotul Absorb

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPE	
		Nombre UCD/Boîte	Nombre UCD	Nombre boîtes
503897	Petit : 6 x 6 cm	16	128	8
503899	Standard : 13 x 12 cm	16	128	8
503901	Grand : 15 x 20 cm	10	40	4

Lire attentivement la notice

UrgoTul Absorb



DESCRIPTION

COMPOSITION : **Urgotul Absorb** est un pansement hydrocellulaire absorbant bénéficiant de la Technologie TLC, innovation des Laboratoires URGO.

Urgotul Absorb est constitué :

- d'une masse lipido-colloïde micro-adhérente au contact de la plaie facilitant la pose, le retrait atraumatique et le positionnement du pansement
- d'une compresse polyuréthane absorbante,
- d'un support non tissé en polyuréthane élastique.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

CICATRISATION :

- En présence des exsudats, les particules hydrocolloïdes issues de la TLC se gélifient et forment un film lipido-colloïde à l'interface plaie/pansement.

Il en résulte des propriétés spécifiques :

- maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation,
- retrait atraumatique pour les tissus néoformés
- caractère indolore du renouvellement de pansement pour le patient,
- respect de la peau péri-lésionnelle.
- La compresse absorbante assure un drainage optimal des exsudats, protégeant la peau péri-lésionnelle de tout phénomène de macération.
- Le support est souple, conformable et très confortable ; il permet une conformabilité du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
- Le pansement est micro-adhérent, facilite les soins infirmiers en termes de praticité et d'observance du traitement.

INDICATIONS

Urgotul Absorb est indiqué pour le traitement de toutes les plaies exsudatives chroniques (escarres, ulcères, plaies du pied diabétique) et aiguës (brûlures du 2^{ème} degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires), et pour le traitement local d'appoint de la plaie cancéreuse en association à son traitement spécifique. En raison de son caractère non-adhésif, **Urgotul Absorb** est recommandé pour le traitement des plaies lorsque la peau péri-lésionnelle est fragilisée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer au sérum physiologique.
- Application du pansement :
 - retirer les ailettes de protection,
 - appliquer la face micro-adhérente du pansement **Urgotul Absorb** sur la plaie,
 - **Urgotul Absorb** peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, si besoin, la taille du pansement à la plaie.
 - maintenir le pansement avec une bande de fixation de type **Nylexfix®**,
 - le pansement peut être posé sous contention, si elle est prescrite.
- Renouvellement du pansement : le pansement **Urgotul Absorb** se renouvelle tous les 2 à 4 jours, en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- La masse lipido-colloïde micro-adhérente d'**Urgotul Absorb** adhère aux gants chirurgicaux en latex, aussi est-il recommandé de manipuler le produit en évitant le contact avec la face enduite ou en utilisant des pinces stériles.
- En présence de signes cliniques d'infection locale, le traitement peut, à l'appréciation du médecin, être relayé par un pansement antibactérien de type **Urgocell Ag**.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas re-stériliser le pansement.
- Stocker le pansement **Urgotul Absorb** à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°). Protéger de la lumière.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed) .
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).

UrgoTul Absorb Talon



Pansement absorbant lipido-colloïde micro-adhérent

Urgotul Absorb Talon

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION <i>Nombre UCD/Boîte</i>	GROUPAGE	
			<i>Nombre UCD</i>	<i>Nombre boîtes</i>
503903	Standard : 12 x 19 cm	16	128	8

Lire attentivement la notice

UrgoTul Absorb Talon



DESCRIPTION

COMPOSITION : Urgotul Absorb Talon est un pansement absorbant bénéficiant de la Technologie TLC, innovation des Laboratoires URGO.

La Technologie TLC consiste à assembler une compresse polyuréthane avec une matrice lipido-colloïde micro-adhérente, qui facilite la pose, le retrait atraumatique et le positionnement du pansement par ses propriétés de micro-adhérence.

Urgotul Absorb Talon est donc constitué :

- d'une masse lipido-colloïde micro-adhérente au contact de la plaie déposée sur une compresse polyuréthane absorbante,
- d'un support non tissé en polyuréthane élastique.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

- En présence des exsudats, les particules hydrocolloïdes issues de la TLC se gélifient et forment un film lipido-colloïde à l'interface plaie/pansement.

Il en résulte des propriétés spécifiques : - maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation,

- gélification au contact de la plaie,
- retrait atraumatique pour les tissus néoformés,
- caractère indolore du renouvellement de pansement pour le patient,
- respect de la peau péri-lésionnelle.
- La compresse absorbante assure un drainage optimal des exsudats, protégeant la peau péri-lésionnelle de tout phénomène de macération.
- Le support est souple, conformable et très confortable ; il permet une conformabilité du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
- Le pansement est micro-adhérent, facilite les soins infirmiers en termes de praticité et d'observance du traitement.

INDICATIONS

Urgotul Absorb Talon est indiqué pour le traitement de toutes les plaies localisées au talon : plaies chroniques (escarres talonnières) et plaies aiguës de la partie postérieure du pied (brûlures du 2^{ème} degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires). En raison de son caractère non adhésif, **Urgotul Absorb Talon** est recommandé dans le traitement des plaies présentant une peau péri-lésionnelle fragilisée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer au sérum physiologique.
- Application du pansement : - Le pansement a la forme d'une flèche. Retirer les ailettes de protection et positionner la flèche vers l'avant du pied.
 - Placer le talon au centre de la face micro-adhérente du pansement **Urgotul Absorb Talon** (partie rétrécie de la flèche).
 - Fixer la partie postérieure de la flèche au niveau du tendon d'achille. Enlever les ailettes latérales et appliquer soigneusement les parties latérales du pansement de part et d'autre du pied.
 - Maintenir le pansement en place avec une bande de fixation de type Nylax.
- Renouvellement du pansement : le pansement **Urgotul Absorb Talon** se renouvelle tous les 2 à 4 jours, en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- La masse lipido-colloïde micro-adhérente d'**Urgotul Absorb Talon** adhère aux gants chirurgicaux en latex, aussi est-il recommandé de manipuler le produit en évitant le contact avec la face enduite ou en utilisant des pinces stériles.
- En présence de signes cliniques d'infection locale, le traitement peut, à l'appréciation du médecin, être relayé par un pansement antibactérien de type **Urgocell Ag**.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas re-stériliser le pansement.
- Stocker le pansement **Urgotul Absorb Talon** à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°). Protéger de la lumière.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed).
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).