

ANIOXY-SPRAY WS

Détergent
Désinfectant
à pulvériser

PRÊT A
L'EMPLOI



INDICATIONS

Détergent désinfectant à spectre large des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (stéthoscopes, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie ...).

PROTOCOLE D'UTILISATION




1

Pulvériser directement sur la zone à traiter ou sur un non-tissé propre et sec.



2

Frotter la surface.

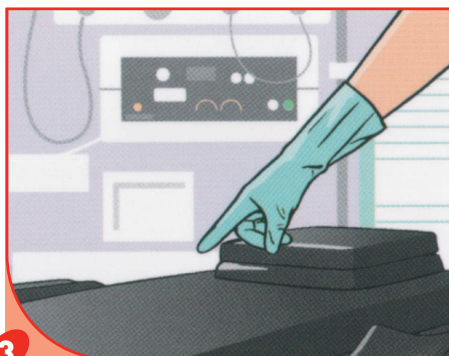

3

Laisser agir en respectant le temps de contact indiqué selon l'activité antimicrobienne recherchée.
Ne pas rincer.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Le statut réglementaire des produits (dispositif médical ou produit biocide) est précisé sur l'étiquette.