

URGOSTÉRILE



Pansement stérile à usage unique haute tolérance cutanée

Urgostérile

Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION <i>compresse</i>	GROUPEGE	
			<i>UCD</i>	<i>boîte</i>
502413	5,3 cm x 7 cm	2,9 cm x 3,5 cm	50	40
502414	10 cm x 7 cm	7 cm x 3,5 cm	50	18
502415	10 cm x 9 cm	7 cm x 4,5 cm	50	16
502417	15 cm x 9 cm	11,5 cm x 4,5 cm	20	16
502424	20 cm x 9 cm	15,8 cm x 4,5 cm	20	16
502429	25 cm x 9 cm	19,4 cm x 4,5 cm	20	16
502430	30 cm x 9 cm	23 cm x 4,5 cm	20	12
502431	35 cm x 9 cm	26,75 cm x 4,5 cm	20	12

Lire attentivement la notice

URGOSTÉRILE



DESCRIPTION

- Support non tissé, extensible, à base de fibres polyester.
- Masse adhésive acrylique de haute tolérance cutanée.
- Compresse centrale absorbante en non tissé, recouverte d'un voile anti-adhérent en polyéthylène.
- Adhésif sur les quatre côtés.
- Présentation sous sachet pelable individuel.
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

PROPRIETES

- Extensible : il suit les mouvements des articulations ou les plis de la peau sans risque de rupture ou de décollement.
- Non tissé : micro aéré, il évite la macération.
- Haute tolérance cutanée : respect des peaux sensibles.
- Ne colle pas à la plaie grâce au voile de polyéthylène recouvrant la compresse.
- Très bonne durée d'adhésivité avec ablation aisée, protection totale de la plaie.
- Pansement stérile limitant le risque septique.
- Transparent aux rayons X.

INDICATIONS

- Réalisation de pansements en chirurgie ambulatoire, coelochirurgie, en chirurgie post-opératoire.
- Protection rapide, efficace et aseptique de points de ponctions : d'alimentation parentérale, de biopsie, de dialyse.

CONSEILS D'UTILISATION

- Appliquer sur une peau nettoyée et séchée (l'usage de produits gras type pommades ou crèmes nuit à l'adhésivité).
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique et sécher la peau avant l'application d'**Urgostérile**.
- Surveiller et renouveler le pansement régulièrement.
- En cas de suspicion d'infection, contacter un médecin.
- Éviter les tensions à la pose.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe I stérile (GMed).
Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).