



<i>Description générale</i>	Broyeur de comprimés	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Oui	
<i>Code ACL</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Oui	A l'oxyde d'éthylène
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Eau + nettoyant ménager
<i>Substance(s) impropre(s)</i>	Substances attaquant le plastique (ABS, PS)	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	ABS, PS	
<i>Etiquetage</i>	Oui	Référence, lot, COMED, dénomination 7 langues
<i>Emballage</i>	Oui	Individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Dans un endroit sec et propre à l'abris du rayonnement du soleil
<i>Durée d'utilisation</i>	Courte	
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références + extensions</i>	16 200 52	
<i>Désignation</i>	Broyeur de comprimés ergonomique	
<i>Dimensions L x l x H (mm)+- 3mm</i>	68 x 50 x 48	
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	49	
<i>Couleurs</i>	Bleu et transparent	
<i>Résistance température (°C)</i>	-10 à +60°C	
<i>Utilisation</i>	Article permettant de broyer des comprimés dans le but de faciliter leur ingestion.	
<i>Mode d'emploi</i>	Positionner le comprimé dans le broyeur et revisser progressivement la partie supérieure afin de broyer le comprimé contenu dedans. Pour faciliter le broyage et éviter d'endommager le broyeur, il est fortement recommandé de positionner les comprimés sur la tranche ou de biais et non à plat, la surface de résistance est ainsi plus restreinte et le broyage sera facilité.	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Bien nettoyer le broyeur avant et après utilisation afin d'empêcher le mélange entre deux traitements différents.	
<i>Recyclage</i>	Non	
<i>Récupération</i>	Dans les bacs de déchets ménagers	
<i>Latex/Antistatique</i>	Non/Non	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/Non	



Fiche technique et de sécurité  
Broyeur de comprimés  
REF. 16 200 52  
TCE3 - Non dispositif médical

Création : 26.11.2012  
Mise à jour : 21.02.2018  
Indice de révision : c

Page 2/2

<i>Phtalates/PVC</i>	Non/Non
<i>RoHs</i>	NC
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul                      Combinaisons de phrases = Nul

Rédacteur : Marion KLEIN  
Fonction : AQ  
Paraphe : MK

COMED SAS  
8 rue Louise Michel  
67200 STRASBOURG - France  
[www.comed.fr](http://www.comed.fr)