

A CHAQUE SAIGNEMENT, SON COALGAN®

Coalgan® ADHÉSIF

Pour les :

- Coupures
- Ampoules ouvertes
- Petites Plaies



Coalgan® POUDRE

Pour les :

- Éraflures
- Coupures de rasoir
- Plaies du cuir chevelu
- Erythèmes fessiers
- Zones de plis



Coalgan® MÈCHE

Pour les saignements abondants :

- De nez
- Buccaux
- Cutanés



Coalgan®
www.coalgan.com
COMPRESSE



Arrête
le saignement

COALGAN®,
naturellement

LABORATOIRES
BROTHIER



COMPOSITION / PROPRIÉTÉS

Coalgan® COMPRESSE est une compresse stérile bio-active de fibres d'alginate de calcium*.

*Issu d'algues marines.

> **Arrête rapidement le saignement** : l'alginate de calcium favorise l'agrégation des plaquettes et diminue le temps de coagulation.

> **Favorise la cicatrisation** : l'alginate de calcium stimule les cellules clés de la cicatrisation, activant ainsi les défenses contre les micro-organismes et les bactéries. Les risques de complications dermatologiques sont ainsi réduits.

> **Apaise la sensation de douleur** : au contact de la plaie, les fibres d'alginate de calcium se gélifient pour permettre un retrait sans douleur.

INDICATIONS

- Saignement des plaies superficielles
- Brûlures superficielles et suintantes
- Saignement de nez
- Saignements buccaux
- Saignement des zones très vascularisées (arcades sourcilières...)

Coalgan® COMPRESSE s'utilise chez l'enfant, l'adulte et la femme enceinte et est recommandée chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux (Rendu-Osler, von Willebrand, hémophilie) ou acquis (sous anti-agrégants plaquettaires, anti-vitamine K ou héparines). Un saignement persistant nécessite un avis médical.

MODE D'UTILISATION


SAIGNEMENT DE PLAIES SUPERFICIELLES

Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon ou du sérum physiologique (NaCl à 0,9%).

Maintenir Coalgan® COMPRESSE sur la lésion en exerçant une légère pression pendant 2-3 minutes (si nécessaire avec l'aide d'un adhésif) jusqu'à l'arrêt du saignement. Au retrait, les éventuelles fibres restantes s'éliminent naturellement.

SAIGNEMENT DE NEZ

Pencher la tête en avant et se moucher afin d'éliminer d'éventuels caillots. Rouler Coalgan® COMPRESSE dans le sens de la largeur pour obtenir une mèche compacte (la compresse peut-être imprégnée de sérum physiologique NaCl à 0,9% pour faciliter son introduction). Introduire la compresse dans la narine et pincer le nez pendant 10 min. Laisser la compresse en place 30 min.

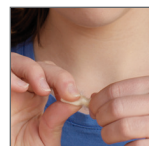

Si le saignement persiste encore 8 à 15 minutes après l'application de Coalgan® COMPRESSE, consulter un médecin.

Pour les saignements abondants, préférer Coalgan® Mèche.

CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES

Aucune contre-indication connue à ce jour. Coalgan® COMPRESSE contient des traces de tensio-actif, son utilisation peut provoquer des réactions d'hypersensibilité chez certains sujets sensibilisés.

INTERACTIONS

Coalgan® COMPRESSE ne doit pas être utilisée avec des solutions alcalines, telles que les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivre. Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec une solution de NaCl à 0.9% avant d'appliquer Coalgan® COMPRESSE.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser en raison d'un risque de contamination microbienne et de perte de performance. Toujours utiliser le produit dans son intégralité (sans couper, ni effiloche). Ne doit pas rester en place plus de 24 heures.

Pour plus d'informations : www.stop-saignements.com

CE
0459



STERILE R



Les Laboratoires Brothier

41, rue de Neuilly - 92735 Nanterre Cedex - France

info@brothier.com - www.brothier.com

Site de production :

ZA des Roches - 49590 Fontevraud l'Abbaye - France



LABORATOIRES

BROTHIER

 numéro vert 0 800 355 153

