



# FICHE TECHNIQUE

## ETHYLOTEST CHIMIQUE

Hygiène garantie par usage unique  
Simple d'utilisation



Conforme NF X 20-702

### Caractéristiques techniques

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de mesure                              | Analyse d'un souffle direct                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Utilisation                                 | Notice d'utilisation et d'interprétation des résultats imprimée directement sur le ballon et l'emballage.                                                                                                                                                                               |
| Mode de contrôle                            | Analyse de l'air expiré par réaction chimique.<br>Les cristaux jaunes changent de couleur (vert) en présence d'alcool.<br>Calibré à 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré (correspondant à 0,5 g d'alcool par litre de sang).                                                         |
| Lecture des résultats                       | Résultat de la mesure fourni sous forme de coloration plus ou moins importante en fonction du taux d'alcoolémie.<br>Utilisation conjointe du nuancier de couleur et de la notice d'interprétation.<br>Le résultat doit être lu entre minimum 2 minutes après le test et maximum 10 min. |
| Seuil réglementaire                         | Le résultat est négatif, le taux d'alcoolémie est inférieur au seuil réglementaire de 0,25mg/l d'air (< 0,5g/l de sang).<br>Le résultat est positif, le taux d'alcoolémie est supérieur ou égal au seuil réglementaire de 0,25mg/l d'air ( $\geq$ 0,5g/l de sang).                      |
| Temps de dégonflage du ballon               | 20 secondes                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Volume du ballon                            | 1 litre                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Température de fonctionnement               | Entre 10°C et 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stockage                                    | A conserver à l'abri de la lumière entre 10°C et 40°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conditionnement                             | Différents conditionnements sont disponibles : En sachet, en Boite de 2 éthylotests, en présentoirs de boîte ou sachet etc.                                                                                                                                                             |
| Durée de vie                                | Deux ans après la date de fabrication                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conformité                                  | Norme NF X 20-702 de 2007                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Système d'Assurance Qualité<br>PELIMEX S.A. | Attestation CE délivrée par le LNE/GMED (CE0459)<br>Certification NF EN 13485 (2004) & ISO 9001 (2008)                                                                                                                                                                                  |

Sous réserve de modifications techniques - révision – 01/2013