

## Circuit du médicament et des DM | Gamme préparation du médicament

# ÉCRASE-COMPRIMÉS TOOKAN®

L'écrase-comprimés Tookan® permet de réduire les comprimés en une **fine poudre**. Équipé d'une poignée permettant l'écrasement des comprimés sans effort, il convient à tous.

Grâce aux sachets stockables dans le Tookan®, **aucune perte ni contamination** n'est possible avec d'autres médicaments. L'hygiène est donc totalement respectée !



Maniable



Ergonomique



Hygiénique



- Facile d'utilisation
- Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Broyage sans effort
- Stockage des sachets dans l'appareil



## GAMME PRÉPARATION DU MÉDICAMENT

# ÉCRASE-COMPRIMÉS TOOKAN®

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ÉCRASE-COMPRIMÉS TOOKAN®

- Base en tôle acier peinte époxy
- Poignée en aluminium
- Mâchoire en aluminium anodisé
- Axes en inox

#### SACHETS POUR ÉCRASE-COMPRIMÉS

- Polyéthylène basse densité transparent
- Épaisseur : 180/200 µm
- Respectueux de l'environnement



*Désignation*

*Dimensions (en mm)*

*Référence*

**Écrase-comprimés manuel Tookan®**

L. 265 x P. 75 x H. 90

NA00017

**Lot de 1000 sachets pour Tookan®**

L. 50 x H. 120

NA00011.01

### UTILISATION



1 Prenez un sachet rangé dans le bac de stockage.



2 Placez le ou les médicaments dans le sachet, puis insérez-le dans la mâchoire du broyeur.



3 Donnez quelques pressions avec votre main...



4 ... puis relâchez.



5 Vous pouvez récupérer les médicaments réduits en fine poudre.



### Équipements complémentaires

Découvrez notre broyeur de comprimés électrique Severo® ainsi que notre coupe-comprimés et écrase-comprimés de poche.