



3M France - Marchés de la Santé
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
N° Azur : 0 810 331 300 - Fax : 01.30.31.85.51

FICHE TECHNIQUE

3M™ Nexcare™ ColdHot™ COLD SPRAY

Bombe aérosol à froid instantané

Marquage CE: Classe IIa de la directive 93/42

Organisme notifié 0546

I – Indications

- Cold spray est indiqué comme un réfrigérant cutané topique dans le but de soulager temporairement la douleur et retarder ou diminuer l'apparition d'œdème après traumatismes mineurs du système musculo-squelettique.
- Source de froid facilement disponible lors des voyages et pendant la pratique du sport.

L'effet réfrigérant est obtenu grâce à l'évaporation rapide du produit à partir de la surface de la peau.



II – Caractéristiques

- **Composition:**

- Menthol: 0,06%
- Isopropyl alcool: 2,06%
- Isopropyl myristate: 2%
- Parfum 0,8 %
- Butane/propane: 95,08 %

- **Durée de vie du produit :**

- 5 ans à partir de la date de fabrication. Voir la date imprimée sur la base du flacon.

- **Présentation commerciale :**

- Flacon aérosol de 150 ml.

III – Avantages

Procure du froid instantanément pour soulager la douleur et réduire l'inflammation.

Taille adaptée à la pratique sportive.

Source de froid facilement transportable lors des voyages.

IV – Origine

- Lieu de fabrication : Italie



3M France - Marchés de la Santé
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
N° Azur : 0 810 331 300 - Fax : 01.30.31.85.51

V - Mode d'emploi, précautions d'usage, restrictions

Vaporiser le produit sur la zone affectée à une distance minimale de 25 cm pendant au maximum 5 secondes, en utilisant un mouvement de balayage.

Mise en garde:

Ne pas concentrer le jet du pulvérisateur sur un seul endroit pour éviter tout risque de brûlure par le froid.

Ne pas utiliser Cold Spray sur plaies ouvertes, abrasions ou sur les muqueuses.

En cas d'apparition d'une réaction cutanée inattendue, demander un avis médical.

Utilisation externe uniquement.

VI -Conditionnement

- Ville

Code commande	Référence	Description	Contenance	Bombes/ carton
452792.2	N157501	Bombe de froid	150ml	12

Médecin Soins des Plaies : Tél 01 30 31 85 90 - Mise à jour 22 Septembre 2011