



INDICATIONS

Soin des plaies exsudatives superficielles :

- sites donneurs de greffes
- brûlures
- lésions radiques
- dermabrasions.

DESCRIPTION

JELONET Plus est un pansement non adhérent.

JELONET Plus est :

- **Peu adhérent** : le bourgeon charnu n'est pas altéré au retrait du pansement.
- **Perméable** à l'air et à l'exsudat.
- **Aéré** : les mailles du support favorisent le drainage de l'exsudat, évitant tout risque de macération. L'absorption de l'exsudat est assurée par un pansement secondaire adapté.
- **Confortable** : réduction de la douleur liée au pansement.

La gaze de **JELONET Plus** est composée d'un tissu d'acétate à mailles régulières et imprégnées d'une pommade hydrophobe à base de corps gras.

COMPOSITION DU PRODUIT

Absence de latex, colophane, phtalate (DEHP) et PVC :

Compresse d'acétate de cellulose imprégnée d'une pommade à base de vaseline, paraffine et alcool de lanoline.

COMPOSITION DU CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Absence de latex, métaux lourds et PVC.

Le pansement est conditionné dans un sachet individuel thermosoudé pelable en polyéthylène téréphtalate / polyéthylène.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez des patients présentant des allergies connues à l'un des composants suivants :

- vaseline
- alcool de lanoline
- paraffine.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Usage unique.
- Ne pas utiliser si le sachet individuel est ouvert ou endommagé (perte de la garantie de stérilité).

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

1. Ouvrir le sachet.
2. Prendre le pansement à l'aide d'une pince ou de gants.
3. Placer le pansement doucement sur la plaie.
4. Utiliser un pansement absorbant pour éliminer l'excès d'exsudat si nécessaire.
5. Recouvrir d'un pansement secondaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications du produit fini :

- Masse surfacique du support acétate : en moyenne 119 g/m²
- Masse surfacique d'imprégnation de la pommade : minimum 0,78 g/dm²

Stérilisation : Irradiation gamma.
(conformément aux exigences des normes EN 556 et EN ISO 11137)

Durée de vie et

Conditions de stockage : 3 ans à l'abri de l'humidité, à une température n'excédant pas 25°C.

Procédé de destruction : Incinération.

PRESENTATIONS COMMERCIALES

Hôpital :

Code produit	Dimensions	Unité de commande	Carton standard
66321555	10cm x 10cm	Boîte de 100 pansements	400 pansements
66321556	10cm x 10cm	Boîte de 10 pansements	200 pansements
66321557	10cm x 40cm	Boîte de 10 pansements	200 pansements

Pharmacie :

Code produit	Dimensions	Code ACL 13	Code LPP*	PLV (TTC)	Unité de commande
66321556	10cm x 10cm	3401045878291	1314367	14,38 €	Boîte de 10 pansements
66321557	10cm x 40cm	3401045878352	1356408	53,17 €	Boîte de 10 pansements

**Liste des Produits et Prestations Remboursables prévue à l'article L .165-1 du code de la Sécurité Sociale.*

Prise en charge : le pansement vaseliné est indiqué dans la phase de bourgeonnement.

INFORMATIONS TECHNICO-REGLEMENTAIRES

Classe du dispositif médical (Dir. 93/42/CEE-annexe IX) :	Ila, règle 4
Marquage CE :	Certificat n°CE 00356
Organisme notifié :	BSI – n°2797
Code CLADIMED :	F51BG01
Code GMDN :	46855
Etiquetage :	Conforme à l'annexe I de la directive 93/42/CEE
Fabricant :	Fabriqué au Canada pour Smith & Nephew Medical Limited - Hull HU3 2BN – Angleterre Certifications ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001
Mandataire :	Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemannenstraße 14 - 78532 Tuttlingen – Allemagne
Distributeur :	Smith & Nephew S.A.S. 92200 Neuilly sur Seine Certification ISO 9001
Contrôles :	Matières premières : - <u>Support</u> : aspect, couleur, masse surfacique, contexture. - <u>Pommade</u> : couleur, odeur, aspect, composition. Produit fini : Aspect, masse surfacique d'imprégnation de pommade, dimensions, poids, intégrité du scellage, stérilité.
Sécurité biologique :	Conforme à la norme EN ISO 10993 : Evaluation biologique des dispositifs médicaux.