

UrgoClean



Pansement hydrodétersif absorbant

UrgoClean®

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
			Nombre UCD/Boîte	Nombre UCD
506433	Petit : 6 x 6 cm	10	180	18
506435	Standard : 10 x 10 cm	16	256	16
506434	Grand : 15 x 20 cm	10	180	8

Lire attentivement la notice

UrgoClean



DESCRIPTION

COMPOSITION :

Le pansement **URGOCLEAN**®, innovation des Laboratoires URGO se présente sous la forme d'une compresse stérile, non tissée, composée de fibres hydro-détersives (polyacrylate) à haut niveau d'absorption et de cohésion.

Cette innovation unique consiste à croiser par thermolisation, dans un plan parallèle à la plaie, des fibres de polyacrylate selon une disposition structurale qui confère à **URGOCLEAN**® ses propriétés d'absorption et de piégeage des résidus fibreux de la plaie et de résistance à la traction.

Cette compresse hydro-détersive est enduite par une matrice lipido-colloïde micro-adhérente qui se gélifie facilitant ainsi le drainage des résidus fibreux, le positionnement et le retrait du produit.

PRESENTATION : Conditionnement individuel stérile.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

Au contact des exsudats, les particules lipidocolloïdes issues de la TLC micro-adhérente se gélifient créant un milieu humide favorable à la détersion. Concomitamment, les fibres hydro-détersives de polyacrylate se gélifient et se fixent aux résidus fibreux, les absorbent et les drainent afin d'en faciliter l'élimination (détersion autolytique). En conséquence, la fixation et le drainage des résidus fibreux par la structure hydro-détersive d'**URGOCLEAN**® associée à sa TLC micro-adhérente favorisent la phase de détersion des plaies fibreuses.

Il résulte de ce mode d'action les propriétés spécifiques :

- Absorption des exsudats, gélification et drainage des tissus fibreux au cours de la phase de détersion.
- Absorption et piégeage des bactéries par la structure des fibres hydro-détersives de polyacrylate.
- Maintien d'un milieu humide au contact de la plaie favorable à la cicatrisation des zones détergées.
- Contrôle facilité des saignements mineurs de plaies.
- Retrait monobloc du pansement grâce à la résistance, à la traction des fibres hydro-détersives.
- Retrait atraumatique et indolore pour la plaie et respect de la peau péri-lésionnelle grâce à la TLC micro-adhérente.

INDICATIONS

INDICATIONS : **URGOCLEAN**® est indiqué dès la phase de détersion des plaies exsudatives chroniques (ulcères de jambe, escarres de décubitus, ulcérations du pied diabétique dont le mal perforant plantaire) et des plaies potentiellement fibreuses : plaies aiguës (brûlures, dermabrasions, plaies traumatiques), plaies post-opératoires, plaies oncologiques.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Préparation de la plaie :
 - Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel et la rincer au sérum physiologique.
 - Si un antiseptique a préalablement été utilisé (à l'exception des antiseptiques contre indiqués), rincer attentivement la plaie au sérum physiologique avant d'appliquer **URGOCLEAN**®.L'utilisation d'**URGOCLEAN**® ne dispense pas d'une détersion mécanique associée lorsque celle-ci est nécessaire.
- Application du pansement :
 - Retirer les ailettes de protection.
 - **URGOCLEAN**® peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, si besoin, la taille du pansement à celle de la plaie.
 - Appliquer la face micro-adhérente d'**URGOCLEAN**® au contact de la plaie et de ses anfractuosités.
 - Recouvrir **URGOCLEAN**® d'un pansement secondaire approprié à la localisation et au caractère exsudatif de la plaie.
- Renouvellement du pansement :

URGOCLEAN® sera renouvelé tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion de la plaie puis avec une fréquence adaptée (jusqu'à 7 jours) au volume des exsudats et à l'évolution clinique de la plaie. Jeter toute partie non utilisée selon les procédures et directives locales.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- La masse lipido-colloïde micro-adhérente d'**URGOCLEAN**® adhère aux gants chirurgicaux en latex. Aussi, il est recommandé de manipuler le pansement en évitant le contact avec la face enduite ou en utilisant des pinces stériles.
 - L'utilisation concomitante avec une crème, une pommade, un onguent, une émulsion n'est pas recommandée.
 - Au cours de la détersion, un agrandissement de la plaie peut apparaître du fait de l'élimination progressive des tissus fibreux.
 - En raison de son caractère non occlusif, **URGOCLEAN**® peut être utilisé sur une plaie colonisée sous stricte surveillance médicale.
 - Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
 - Conditionnement individuel stérile (radio-stérilisé) à usage unique: La réutilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection».
 - Ne pas re-stériliser.
- ### CONTRE-INDICATIONS :
- Sensibilité connue au pansement ou à l'un de ses composants.
 - Ne pas utiliser en tant qu'éponge chirurgicale pour des plaies très hémorragiques.
 - Ne pas associer au peroxyde d'hydrogène, ni à des antiseptiques de la famille des organo-mercuriels ou d'hexamidine.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed).

Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %), dans la prise en charge des plaies exsudatives dès la phase de détersion

UrgoClean

Meche



Mèche hydrodétersive absorbante avec sonde stérile

UrgoClean mèche®

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
			Nombre UCD/Boîte	Nombre UCD
506436	5x 40 cm	16	96	6

Lire attentivement la notice

UrgoClean

Meche



DESCRIPTION

COMPOSITION :

URGOCLEAN® mèche, innovation des Laboratoires URGO se présente sous la forme d'une mèche stérile, non tissée, composée de fibres hydro-détersives (polyacrylate) à haut niveau d'absorption et de cohésion.

Cette innovation unique consiste à croiser par thermoliasion, des fibres de polyacrylate selon une disposition structurale qui confère à **URGOCLEAN® mèche** ses propriétés d'absorption et de piégeage des résidus fibreux de la plaie et de résistance à la traction.

PRESENTATION : Conditionnement individuel stérile.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

Au contact des exsudats, les fibres hydro-détersives de polyacrylate se gélifient et se fixent aux résidus fibreux, les absorbent et les drainent afin d'en faciliter l'élimination (détersion autolytique).

- Absorption et drainage des résidus fibreux et bactériens des plaies chroniques, favorisant la phase de détersion.
- Absorption et drainage des exsudats séro-hématiques des plaies post-opératoires.
- Contrôle facilité des saignements mineurs de plaies.
- Retrait monobloc du pansement grâce à la résistance, à la traction des fibres hydro-détersives.
- Retrait atraumatique et indolore pour la plaie.

INDICATIONS

INDICATIONS : **URGOCLEAN® mèche** est indiquée dès la phase de détersion des plaies exsudatives cavitaires et anfractueuses, chroniques (ulcères de jambe, escarres de décubitus, plaies du pied diabétique dont le mal perforant plantaire), aiguës (plaies traumatiques), plaies post-opératoires et oncologiques.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Préparation de la plaie :
 - Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel et la rincer au sérum physiologique.
 - Si un antiseptique a préalablement été utilisé (à l'exception des antiseptiques contre indiqués), rincer attentivement la plaie au sérum physiologique avant d'appliquer **URGOCLEAN® mèche**.
 - L'utilisation d'**URGOCLEAN® mèche** ne dispense pas d'une détersion mécanique associée lorsque celle-ci est nécessaire.
- Application du pansement :
 - Ouvrir l'opercule du blister. Utiliser la sonde afin d'apprécier la profondeur de la plaie si nécessaire.
 - Appliquer **URGOCLEAN® mèche** directement dans la plaie de façon lâche sans exercer de pression excessive.
 - URGOCLEAN® mèche** peut être découpée (dans le sens de la largeur) avec du matériel stérile pour adapter, si besoin, la longueur de la mèche à la profondeur de la plaie.
 - En cas de plaie peu exsudative, l'humidifier à l'aide de sérum physiologique avant application d'**URGOCLEAN® mèche**.
 - S'assurer que la mèche reste visible et accessible dans la plaie cavitaire.
 - Recouvrir **URGOCLEAN® mèche** d'un pansement secondaire approprié à la localisation et au caractère exsudatif de la plaie.
- Renouvellement du pansement :
 - URGOCLEAN mèche** se renouvelle tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion de la plaie puis avec une fréquence adaptée au volume des exsudats et à l'évolution clinique de la plaie. Jeter la sonde après utilisation et toute partie non utilisée d'**URGOCLEAN® mèche** selon les procédures et directives locales.
- Retrait du pansement :
 - S'assurer du retrait de la totalité d'**URGOCLEAN® mèche** de la plaie.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- En raison de son caractère non occlusif et ses propriétés de piégeage bactérien **URGOCLEAN® mèche** peut être utilisée sur une plaie colonisée sous stricte surveillance médicale.
- Au cours de la détersion, un agrandissement de la plaie peut apparaître du fait de l'élimination progressive des tissus fibreux.
- Limiter les contacts de la sonde dans la plaie et ne pas laisser la sonde dans la plaie.
- Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas re-stériliser la mèche, ni la sonde.
- Conditionnement individuel stérile à usage unique : la réutilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection

CONTRE-INDICATIONS :

- Plaie fistuleuse de diamètre inférieur au diamètre de la sonde.
- Plaies sèches.
- Non résorbable, **URGOCLEAN® mèche** ne doit pas être utilisée comme compresse chirurgicale.
- Ne pas utiliser en méchage endo-nasal en chirurgie rhino-sinusienne.
- Ne pas associer au peroxyde d'hydrogène, ni à des antiseptiques de la famille des organo-mercuriels ou d'hexamidine.
- Sensibilité connue au pansement ou à l'un de ses composants.
- Ne pas utiliser en tant qu'éponge chirurgicale pour des plaies très hémorragiques.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed).
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %), dans la prise en charge des plaies exsudatives dès la phase de détersion