

Boîte de lingettes nettoyantes désinfectantes ASEPTONET



Pour nettoyer et désinfecter les dispositifs médicaux.

Conditionnement

Format de lingette : 130 x 200mm

Boîte de 100 lingettes

Carton de 12 boîtes

Composition

Chlorure de benzalkonium, Trideceth -7, Ethanol, Isopropanol.

Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté (sauf *)

- Bactéricide EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 en 5 min.
- Fongicide sur Aspergillus Niger EN1275, EN13697 en 5 min.
- Levuricide sur Candida albicans EN1275, EN1650, EN13697, EN13624* en 5 min.
- Virucide EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min, Influenza A (H1N1)* en 1 min.

Mode d'emploi

Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité. Insérer ensuite la lingette centrale à l'intérieur du capot. Produit prêt à l'emploi à usage unique. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

Bien refermer le couvercle après utilisation.

Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

Temps de contact : 5 minutes (1 minute pour le virus Influenza H1N1).

Précautions d'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.



Réf : ASEP0001 - Code formule 998 077

Fiche Technique. Version 4- 11/2011

STERIDIS - ZAC de la Blanche Tâche - 80450 CAMON

Tél : 03 22 09 41 39 - Fax : 03 22 50 01 34 - mail : contact@steridis.com