

## FICHE TECHNIQUE

### **3M™ Medipore™ + Pad**

#### Pansement adhésif stérile avec compresse

Marquage CE - Classe I stérile selon la directive 93/42

#### **I - Indications**

3M Medipore + Pad est un pansement stérile conçu pour protéger les plaies aiguës légèrement hémorragiques et/ou exsudatives, telles que : coupures, brûlures, abrasions, sites de cathétérisme IV et incisions chirurgicales ou les plaies chroniques de faible profondeur.

#### **II - Caractéristiques du produit**

Très extensible, il s'adapte à toute localisation, et ses bords arrondis permettent une meilleure tenue. Perméable à l'air et la vapeur d'eau, il laisse respirer la peau, et sa compresse, la plus absorbante de sa gamme, n'adhère pas à la plaie.

#### ▪ **Composition**

- Support : 100% Polyester-sontara non tissé.
- Compresse: Fibre de rayonne, recouverte d'un film de polyéthylène microperforé.
- Adhésif : Copolymères d'acrylate de synthèse.
- Feuillet protecteur : Papier siliconé médical

#### ▪ **Caractéristiques physiques:**

Absorption:	1,745 g/cercle de 30 mm de diamètre 19 g/ pansement de 10x 20 cm
M.V.T.R. (support + compresse) :	998 g / m <sup>2</sup> / 24 h
Élongation :	42 %
Adhérence à la peau :	T0 : 66 N/inch T48 h : 123 N/inch
Capacité d'absorption de la compresse :	620% de son poids 1,21 g/2,5 cm 2

#### ▪ **Biocompatibilité:**

- Cytotoxicité sur fibroblastes : non cytotoxique (0,0/0,0) pour le support, la compresse et l'adhésif.
- Irritation primaire de la compresse : minimale (0,1/8,0).
- Irritation primaire de l'adhésif : légère (1,2/8,0)
- Irritation oculaire aiguë: non irritant
- Test de sensibilisation sous-cutanée : pas de toxique diffusables.
- Irritation cumulative : absence de pouvoir irritant.
- Test de Draize : absence de pouvoir allergisant.

#### ▪ **Précautions d'emploi**

- Ne pas utiliser en cas d'allergie à un des composants
- Ne pas étirer le pansement pendant la pose au risque de créer des lésions cutanées mécaniques.

#### ▪ **Emballage**

- Conditionné sous pochette individuelle scellée à chaud sans latex

#### ▪ **Lieu de fabrication:**



**3M France - Marchés de la Santé**  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
N° Azur : 0 810 331 300 - Fax : 01.30.31.85.51

3M Poland – Oddzial we Wroclawin ul. Kwidzynska 6, 51-416 Wroclaw, Pologne.

▪ **Stérilisation:**

Effectuée par irradiation Gamma au Cobalt 60 à dose minimale de 25 kGy

▪ **Durée de validité:**

3 ans à partir de la date de stérilisation dans des conditions de stockage normales à une température moyenne de 10C - 30C, avec 30-60% HR.

▪ **Mode d'élimination:** Incinération.

**III - Conditionnement:**

▪ **Hôpital**

Références	Dimensions	Taille Compresse	pans./ boîte	Gabarit
3562	5 cm x 7 cm	2,5 cm x 4 cm	50	4
3564	6 cm x 10 cm	3,4 cm x 6,5 cm	50	4
3566	10 cm x 10 cm	4,5 cm x 6 cm	25	4
3569	10 cm x 15 cm	4,5 cm x 10 cm	25	4
3570	10 cm x 20 cm	4,5 cm x 15 cm	25	4
3571	10 cm x 25 cm	4,5 cm x 20 cm	25	4
3573	10 cm x 35 cm	4,5 cm x 30 cm	25	4

▪ **Ville**

Références	Dimensions	Pans/Boîte	Code CIP/ACL	Gabarit
3562P	5 cm x 7 cm	10	794738.1	6
3566P	10 cm x 10 cm	10	794739.8	6
3569P	10 cm x 15 cm	10	794740.6	6
3570P	10 cm x 20 cm	10	794741.2	6

Admis à la LPP