

Conveen®

Poche de recueil d'urine.

Poche de recueil de nuit
Conveen Basic
Conveen
Conveen Triform

Porte-poche
Conveen

 Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark
Non stérile

 Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark
Stérile

Mode d'emploi

CM00000000401 Version 3

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2014-11-04

Indication

Poche de recueil d'urine.

Renseignements

Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi de ce produit dans des conditions non conformes aux instructions données dans la notice d'utilisation.

Mise en garde

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Avertissement


La réutilisation de ce produit à usage unique peut entraîner un risque pour l'utilisateur. Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et re-stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommage corporel ou d'infection pour le patient.

 **Coloplast**

Utilisation d'une poche de recueil de nuit avec un porte-poche Conveen

Préparation

1

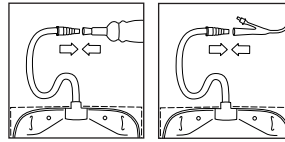


1. La poche de recueil de nuit peut être directement reliée à un étui pénien ou à une sonde à demeure.

Elle peut également être reliée à une poche de jambe pour augmenter la capacité de recueil pendant la nuit. Pour la nuit, la poche de jambe doit être équipée d'une tubulure souple qui s'adaptera au raccord d'entrée de la poche de recueil de nuit.

Sondage intermittent

Une poche de recueil de nuit peut aussi être reliée à une sonde pour sondage intermittent pour recueillir les urines pendant le sondage.

2

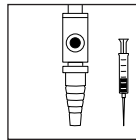


2. Si la poche présente un site de prélèvement, un échantillon d'urine peut être effectué si nécessaire.

Utiliser une seringue avec aiguille.

Conveen Triform


3

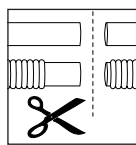

3. Si la tubulure ne présente pas de connecteur préfixé ou si la tubulure elle-même n'est pas fixée à la poche, il est possible de raccourcir la tubulure à la longueur souhaitée. Il suffit de la couper à l'aide de ciseaux.

Concernant la tubulure crénelée, couper en conservant une partie de section lisse aussi grande que possible. Cela garantit un raccordement sûr entre la tubulure et le connecteur ou entre la poche et la tubulure.


4

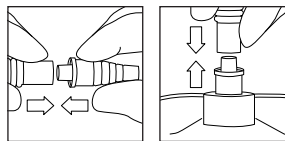

4. Raccorder le connecteur à la tubulure en poussant l'extrémité du connecteur aussi loin que possible dans la tubulure.

Ou fixer la tubulure à la poche en poussant fermement la partie lisse dans l'entrée de raccordement de la poche.

5

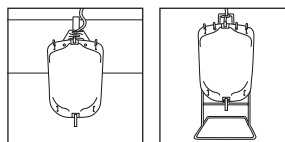

5. Utiliser un porte-poche de lit ou de sol Conveen pour suspendre la poche de recueil de nuit.


Suspendre solidement la poche sur le porte-poche (de lit ou de sol) en insérant les crochets dans les fentes en haut de la poche. Fixer le porte-poche de lit sur le côté de lit ou placer le porte-poche de sol sur le sol près du lit.

Pour assurer une évacuation optimale, il est important que la poche de recueil de nuit soit placée plus bas que vous quand vous êtes couché(e) dans le lit.

Sondage intermittent

Suspendre ou placer la poche à l'endroit que vous trouvez le plus pratique, en vous assurant qu'elle est placée plus bas que votre bassin, selon que vous préférez vous sonder assis(e), debout ou couché(e).

6


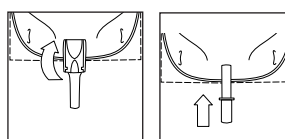


Robinet à clapet
Conveen

Robinet à piston
Conveen Basic

6. Vérifier que le robinet de vidange est fermé.

Utilisation

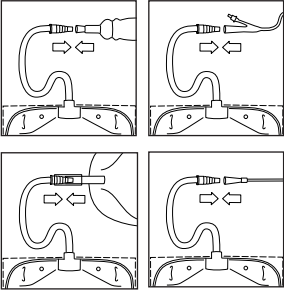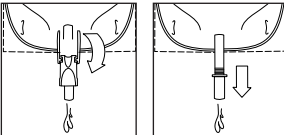- 7
- 
7. Si le connecteur est équipé d'un bouchon de protection, retirez-le.
- Raccorder le connecteur à l'étui pénien ou à la sonde à demeure.
- Vous pouvez également relier fermement le connecteur à la tubulure de vidange de la poche de jambe. Ouvrez le robinet de vidange de la poche de jambe.
- Le système de recueil d'urine est désormais fonctionnel.
- Sondage intermittent*
Raccorder le connecteur à la sonde pour sondage intermittent.
- Quand vous commencez l'autosondage, l'urine s'évacue dans la poche de vidange de nuit.
-
- 8
- 
- Robinet à clapet
Conveen
- Robinet à piston
Conveen Basic
8. Il est recommandé de vider la poche lorsqu'elle est remplie à un peu plus de la moitié afin de garantir une évacuation optimale.
- Sondage intermittent*
Videz la poche après chaque sondage.

Retrait

9. Déconnecter la poche de vidange de nuit de l'étui pénien ou de la sonde à demeure.


Si la poche de vidange de nuit est reliée à la poche de jambe, fermer le robinet de vidange de la poche de jambe. Déconnecter ensuite la poche de vidange de nuit. Évitez de toucher l'extrémité ouverte de la tubulure de sortie de la poche de jambe.

Sondage intermittent

Une fois le sondage terminé, déconnecter la poche de vidange de nuit de la sonde.

Détacher la poche du porte-poche de lit ou de sol.

Élimination des poches

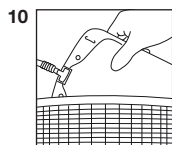

10. Changer la poche quotidiennement.

Le porte-poche de lit ou de sol peut être réutilisé.

Vider la poche avant de la mettre à la poubelle.

La poche est à usage unique et peut être jetée avec les déchets ménagers. Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Symbole



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé