

Fiche Technique et de Sécurité

Thermomètre Digicomed

Réf. N° : 68 000 80

Le dossier technique est réalisée par le fabricant
TCE2

Crée le : 20.11.2012

Mise à jour: 15.10.2015

Indice : d

p 1/2

- Classement du dispositif : Classe IIa
 - Numéro organisme notifié : 0434
 - Conforme à la directive 93/42/CEE
- EC/REP : Well Kang Ltd The Black Church, St Mary's Place
Dublin 7, Ireland.

Description générale	Thermomètre électronique médical étanche. Mémoire de la dernière mesure et indication du niveau de la batterie.	
Pièces jointes	Oui	Photo, mode d'emploi
Référence lot	Oui	
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Oui	Sonde pouvant être nettoyé dans de l'eau savonneuse ou avec une solution désinfectante (alcool 95%).
Substance impropre	Produit attaquant l'acier inoxydable et l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS)	
Pièces constitutives	Non	
Matières	Corps en ABS blanc ; Sonde en acier inoxydable	
Etiquetage	Non	
Emballage	Oui	Dans un étui.
Stockage particulier	Non	Sec et propre.
Marquage sur le DM	Oui	COMED, nom, Lot., CE, étendue de mesure
Références	68 000 80	
Désignation	Thermomètre	
Dimensions Lo x la x H(mm)	126 x 18.5 x 10	
Dimensions de l'écran	14 x 7	
Poids net (g)	10	
Résistance température (°C)	-10 et +40°C	
Étendue de mesure et précision	32 à 42.9°C +/-0.1°C entre 35.5 et 42°C +/-0.2°C au-delà	
Temps de mesure	≈ 1 minute	
Couleurs	blanc	
Alimentation	Pile bouton de 1.55 V LR41	
Utilisation	Permet de prendre la mesure des températures corporelles des enfants et des adultes de 3 manières différentes (rectale, buccale ou axillaire)	
Mode d'emploi	Mesure par voie rectale : Veuillez introduire le thermomètre d'environ 2 cm dans le rectum et attendre 4 minutes. Retirer le thermomètre et visualiser la mesure. Nous vous conseillons une crème lubrifiante pour les personnes sensibles. Mesure par voie buccale : Veuillez introduire le thermomètre sous la langue et attendre 4 minutes. Retirer le thermomètre et visualiser la mesure. Mesure par voie axillaire : Veuillez placer le thermomètre sous l'aisselle et attendre 4 minutes. Retirer le thermomètre et visualiser la mesure.	
Précaution d'emploi	Évitez toute exposition au soleil, à une source d'U.V. ou de chaleur intense. Veuillez à ne pas faire tomber le thermomètre et ne pas le cogner. Ne pas le tordre, le démonter ou le mettre en contact avec des solvants. Ne jamais le mettre dans de l'eau bouillante. Veuillez à toujours bien nettoyer la sonde avant et après chaque utilisation et à conserver le thermomètre dans son étui plastique. Le fabricant recommande un contrôle de précision auprès d'un laboratoire agréé tous les 3 ans. Ne pas laisser à la portée des enfants.	



Fiche Technique et de Sécurité

Thermomètre Digicomed

Réf. N° : 68 000 80

Le dossier technique est réalisée par le fabricant
TCE2

Crée le : 20.11.2012

Mise à jour: 15.10.2015

Indice : d

p 2/2

Recyclage	Non
Récupération	Bac à déchet électrique et électronique.
DEEE/REACH	Oui/NC
Phtalates	Non
Données de sécurité	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul

Rédacteur : JAEGEL Annabel
Fonction : RQ
Paraphe : AJ

COMED SAS
8 Rue Louise Michel
67200 STRASBOURG France
www.comed.fr