

HydroClean ® advance

Pansement irriigo-absorbant



Référence	Taille ou dimensions	Code ACL
609662	Diamètre : 4 cm	6004059
609664	Ovale : 4 x 8 cm	6004061
609666	Diamètre : 5,5 cm	6004060
609668	7,5 x 7,5 mm	6004062
609672	10 x 10 cm	6004063

Produit

Pansement hydrogel irriigo-absorbant, activé par la solution de Ringer pour la détersion des plaies sèches ou exsudatives, infectées ou non. Le pansement est prêt à l'emploi.

Indications / Classification

Traitement en milieu humide des plaies, notamment en cas de retard de cicatrisation. HydroClean ® advance convient particulièrement au traitement de plaies chroniques et à cicatrisation difficile lors des phases de détersion et de granulation. HydroClean ® advance peut également être utilisé afin de réactiver les processus de guérison en stagnation qui sont dus à une activité trop élevée des métalloprotéases matricielles.

HydroClean ® advance est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

- Partie centrale absorbante : nontissé constitué d'un superabsorbant en polyacrylate activé par la solution de Ringer, de cellulose et de polypropylène.
- Film protecteur en polypropylène
- Enveloppe : 1 face blanche de jersey en polypropylène sur laquelle ont été apposées des bandes de silicone, 1 face imprimée Hydroclean en voile nontissé de polypropylène hydrophobe recouvrant un film de polypropylène imperméable à l'eau.

Composition de la solution de Ringer :

- Pour 1000 ml :
- Chlorure de Sodium : 8,6 g/l
- Chlorure de Potassium : 0,3 g/l
- Chlorure de Calcium : 0,33 g/l
- Ions :
- Sodium : 147 mmol/l
- Potassium : 4 mmol/l
- Calcium : 2,25 mmol/l
- Chlorure : 56 mmol/l

Caractéristiques :

HydroClean ® advance doit être fixé à l'aide d'une bande de fixation sèche ou cohésive type Peha-haft ®, ou d'un sparadrap type Omnifix ® ou d'un film de polyuréthane type Hydrofilm ®.

Renouvellement toutes les 24 à 72 heures.

Réhumidification possible par solution de Ringer (en cas de nécessité d'une humidité importante, lors du retrait ou pour soulager la douleur).



Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Présentation individuelle sous pochette pelable aluminium, puis en boîte.

Accompagné d'une notice d'emploi.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
609662	Diamètre : 4 cm	1	10	6	180
609664	Ovale : 4 x 8 cm	1	10	6	189
609666	Diamètre : 5,5 cm	1	10	6	189
609668	7,5 x 7,5 mm	1	10	6	135
609672	10 x 10 cm	1	10	6	77

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton
609662	Diamètre : 4 cm	90 x 125 mm	127 x 92 x 50 mm	285 x 132 x 110 mm
609664	Ovale : 4 x 8 cm	105 x 150 mm	152 x 107 x 52 mm	230 x 165 x 70 mm
609666	Diamètre : 5,5 cm	105 x 150 mm	152 x 107 x 52 mm	230 x 165 x 170 mm
609668	7,5 x 7,5 mm	195 x 125 mm	197 x 127 x 57 mm	264 x 202 x 184 mm
609672	10 x 10 cm	210 x 160 mm	214 x 164 x 65 mm	501 x 225 x 150 mm

Stérilisation

A la vapeur.

Durée de vie : 3 ans.

Contre-indications et précautions d'emploi

Voir la notice

Conseils d'utilisation

HydroClean ® advance doit être fixé à l'aide d'une bande de fixation sèche ou cohésive type Peha-haft ® ou d'un sparadrap type Omnifix ® ou d'un film de polyuréthane type Hydrofilm ®.

Renouvellement toutes les 24 à 72 heures.

Réhumidification possible par solution de Ringer (en cas de nécessité d'une humidité importante, lors du retrait ou pour soulager la douleur).

Accompagné d'une notice d'emploi.