

8. INTERACTIONS

Coalgan ne doit pas être utilisé avec les solutions alcalines, telles les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivre.

Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec une solution de NaCl à 0,9 % avant d'appliquer Coalgan.

9. STÉRILISATION STERILE R

Produit stérile, stérilisé par rayonnement β .
Ne pas re-stériliser.

10. CONSERVATION 30°C

Conserver dans un endroit sec à une température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière. Respecter la date limite d'utilisation.

11. REMBOURSEMENT

Coalgan est remboursé sous nom de marque. Sa prescription n'est pas substituable.

Présentation	Dimensions	Nombre d'unités par boîte	Code ACL
Coalgan	Mèche de 4 cm	5	3401073757667

12. FABRICANT ET TITULAIRE DU MARQUAGE CE

 DM, Classe IIb
- Obtenue en 1997

 Les Laboratoires BROTHIER

41, rue de Neuilly, 92735 NANTERRE cedex, France

 N° Vert 0 800 35 51 53 – Fax : 01 47 25 51 58 – www.brothier.com
Appel gratuit depuis un poste fixe

Produit en France par les Laboratoires Brothier - Distribué par Alloga.

 L A B O R A T O I R E S
BROTHIER

HÉMOSTATIQUE ET CICATRISANT

1. IDENTIFICATION DU DISPOSITIF

a. DÉNOMINATION

Coalgan

b. COMPOSITION

Fibres d'alginate de calcium (origine végétale)

c. FORME ET PRÉSENTATION

Mèche de 4 cm (5/boîte)

Conditionnement en sachet individuel

d. PROPRIÉTÉS

Coalgan est hémostatique et cicatrisant.

2. INDICATIONS

HÉMOSTASE

- Soignement de nez (épistaxis)
- Soignements cutanés (coupures, écorchures, points de ponction)
- Soignements buccaux
- Extractions dentaires

CICATRISATION

- Plaies cutanées ≤ 8 cm²
- Plaies chirurgicales
- Plaies traumatiques (écorchures, coupures, éraflures, ampoules ouvertes, brûlures superficielles)
- Fin de cicatrisation en relais d'Algostéril

Coalgan est efficace chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis (sous antiagréants plaquettaires, anti-vitamines K ou héparine).

Coalgan s'utilise chez l'enfant, la femme enceinte et l'adulte.

3. CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue à ce jour.

4. EFFETS INDÉSIRABLES

Coalgan contient des traces de tensio-actif et peut provoquer des réactions d'hypersensibilité chez certains sujets sensibilisés.

5. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Coalgan peut être humidifié uniquement avec une solution de NaCl à 0,9 % (sérum physiologique) : les ions Na⁺ de la solution NaCl s'échangent avec les ions Ca²⁺ de Coalgan ce qui permet la gélification et le retrait indolore de Coalgan. Ne jamais utiliser de l'eau stérile. Vérifier l'intégrité du sachet avant l'utilisation du produit.



Coalgan®

6. MISES EN GARDE ⓧ

Toujours utiliser Coalgan dans son intégralité (sans couper, sans effiloche).

Coalgan ne doit pas rester en place plus de 24 heures.

Usage unique. Ne pas réutiliser en raison d'un risque de contamination microbienne et de perte de performance.

7. MODE D'UTILISATION

Saignement de nez



1



2



3

Pencher la tête en avant.
Se moucher brièvement
d'éliminer les caillots.

Après avoir ouvert le sachet de Coalgan en suivant les pointillés,
insérer Coalgan pour obtenir une mèche compacte.

Coalgan peut être humidifié avec une solution de NaCl à 0.9%
(sérum physiologique) pour faciliter son introduction dans la narine.



4



5

Introduire Coalgan.
Pincer les deux narines
pendant 10 minutes.

Laisser Coalgan en place au moins
30 minutes, et au maximum 24 heures,
puis utiliser le sachet pour le jeter.

Saignements buccaux / Extractions dentaires (lèvres, gencives, langue, ...)



Appliquer Coalgan
sur la lésion et
le retirer à l'arrêt
du saignement.

Plaies cutanées (hémostase et / ou cicatrisation)



Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon
ou une solution de NaCl à 0.9% (sérum
physiologique).

Appliquer Coalgan sur la lésion et :

- retirer à l'arrêt du saignement
- ou laisser en place pour la cicatrisation
et retirer Coalgan au maximum
à 24 heures.

Un saignement persistant nécessite un avis médical.

Les éventuelles fibres restantes après le retrait de Coalgan s'éliminent naturellement.
Coalgan peut être utilisé avec la lidocaïne-naphazoline.