

Pansement et mèche

 Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark
23312928, v7.0 Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S.
© [10-2012.] Tous droits réservés à Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Danemark.

Avertissement

Ce produit est à usage unique et doit être jeté après utilisation. La réutilisation de ce produit peut entraîner un risque potentiel pour l'utilisateur. Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et la re-stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et être à l'origine de dommages corporels ou d'infection pour le patient.

Précautions

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Ne pas restériliser.

Conserver à plat.

Conserver à température ambiante.

Conserver à l'abri de la lumière directe

Usage externe uniquement.

Biatain Alginate peut être utilisé sur les plaies infectées après avis médical, parallèlement à un traitement approprié et des examens fréquents, en fonction de l'état clinique.

Biatain Alginate n'est pas destiné à contrôler les hémorragies importantes ou prolongées qui ne tarissent pas physiologiquement ou qui requièrent une intervention chirurgicale.

Biatain Alginate ne doit pas être utilisé sur les plaies sèches.

Indications

Biatain Alginate est indiqué dans la prise en charge des plaies modérément à fortement exsudatives.

Biatain Alginate peut être utilisé pour faciliter le contrôle des exsudats et l'hémostase locale au cours de la cicatrisation des plaies, comme pansement externe sur les escarres, les ulcères de jambe veineux, les ulcères artériels, les ulcères du pied diabétique, les sites donneurs ou les plaies traumatiques.

Biatain Alginate peut être utilisé sur les ulcères du pied diabétique sur avis d'un médecin.

Biatain Alginate peut être utilisé sur les plaies exsudatives et pour le comblement des cavités.

Informations

En cas de réactions allergiques, contacter Coloplast.

Coloplast ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi de ses produits dans des conditions non conformes aux instructions données dans la notice d'utilisation.

Biatain Alginate est stérile.

Biatain Alginate est un pansement très absorbant composé d'alginate et d'hydrocolloïdes (carboxyméthylcellulose de sodium).

L'application de Biatain Alginate est très simple. Au contact de l'exsudat de la plaie, il se transforme en gel souple cohésif qui procure un environnement de cicatrisation humide optimal. Le gel permet de retirer Biatain Alginate sans traumatisme.

Les cavités peuvent être recouvertes par le pansement Biatain Alginate. La cavité restante peut être comblée par Biatain Alginate mèche.

Pour optimiser l'utilisation de Biatain Alginate, l'appliquer selon les illustrations. Avant de mettre en place Biatain Alginate, la taille et/ ou la profondeur de la plaie

doivent être déterminées par le professionnel de santé visuellement ou en sondant délicatement.

Comment utiliser le pansement Biatain Alginate ?

1 Rincer la plaie au sérum physiologique ou à l'eau du robinet.

Sécher délicatement la peau autour de la plaie.



2 Le pansement Biatain Alginate peut être découpé à la taille de la plaie.

Si vous devez découper le pansement, il vous est conseillé d'utiliser une paire de ciseaux stérile.



3 Le pansement Biatain Alginate doit être recouvert par un pansement secondaire, ex. le pansement Comfeel Plus Transparent ou le pansement hydrocellulaire Biatain selon l'état clinique de la plaie.

4 Le pansement Biatain Alginate doit être remplacé en même temps que le pansement secondaire. Pour de plus amples informations, consulter les instructions d'utilisation du pansement secondaire utilisé.

Le pansement Biatain Alginate ne doit pas rester en place plus de 7 jours.

Une fois que la quantité d'exsudat a diminué et que la cicatrisation progresse, Le pansement Biatain Alginate peut être arrêté et remplacé par un autre pansement adapté (ex. le pansement hydrocellulaire Biatain ou le pansement Comfeel Plus) pour poursuivre la cicatrisation de la plaie.

5 Le pansement Biatain Alginate peut être retiré facilement par rinçage avec du sérum physiologique. Ôtez-le avec des pinces sans causer de douleur ou de traumatisme sur le tissu nouvellement formé.

Comment utiliser la mèche Biatain Alginate ?

1 Rincer la plaie avec du sérum physiologique ou à l'eau du robinet.

Sécher délicatement la peau autour de la plaie.



2 La mèche Biatain Alginate peut être découpée pour s'ajuster aux plaies petites ou étroites. Si vous devez découper la mèche, il est recommandé d'utiliser une paire de ciseaux stérile.



3 La mèche Biatain Alginate doit être appliquée de manière homogène et souple dans la plaie, sans être tassée. Biatain Alginate mèche forme ainsi un gel cohésif qui s'adapte à la taille de la plaie/ cavité.

La mèche Biatain Alginate peut être imbibée de sérum physiologique avant son application. Pendant l'absorption, la taille d'origine de la mèche ne se modifie pas, mais s'ajuste à la cavité.



4 La mèche Biatain Alginate doit être recouverte d'un pansement secondaire, comme le pansement Comfeel Plus Transparent ou le pansement hydrocellulaire Biatain selon l'état clinique de la plaie.

La mèche Biatain Alginate doit être remplacée en même temps que le pansement secondaire. Pour en savoir plus, voir les instructions d'utilisation spécifiques sur le pansement secondaire.

La mèche Biatain Alginate ne doit pas rester en place plus de 7 jours.



5 La mèche Biatain Alginate peut être retirée facilement par rinçage avec du sérum physiologique. Le retirer avec des pinces sans causer de douleur ou de traumatisme sur le tissu néo formé.

Quand la quantité d'exsudats diminue, la mèche Biatain Alginate pourra être remplacée par un autre pansement adapté (p. ex. le pansement hydrocellulaire Biatain ou le pansement Comfeel Plus) pour poursuivre la cicatrisation de la plaie.

Symbole

	<p>Work Order (WO)/LOT Le n° WO indiqué sur la boîte identifie un lot de conditionnement. Le numéro de LOT qui apparaît sur le sachet unitaire (conditionnement primaire) correspond à un lot de production.</p>
	<p>Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.</p>