

MEDWIPES

LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES POUR SURFACES, PETIT MATÉRIEL, DISPOSITIFS MÉDICAUX.

Lingettes en fibres
biodégradables



Emballage
recyclable

Formule sans alcool

Sans parfum



DESTINATIONS

Nettoyage et désinfection des:

- Surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public (poignées de portes, tables, chaises, toilettes...).
- Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...).

FORMULE

Sans parfum.

Actif: Chlorure de Didécylidiméthylammonium
(n° CAS: 7173-51-5 : 0,29%).

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi à usage unique.
Soulever le couvercle et retirer l'étiquette autocollante. Sortir une lingette du paquet.
Passer 3 lingettes par m² de surface à nettoyer et désinfecter. Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES A 20°C

BACTÉRICIDE	EN1276*, EN13727**, EN13697**, EN16615**	5 min
LEVURICIDE	EN1650*, EN13624**, EN13697**, EN16615**	5 min
ACTIF SUR VIRUS	EN14476** sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus. EN16777** sur Vaccinia, Norovirus, Adenovirus	5 min

*3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton, ** 3g/L albumine bovine

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter le rejet dans l'environnement.
Aucun pictogramme de danger.
En cas d'incident, contacter le CAP le plus proche (01.45.42.59.59).

Produit destiné aux professionnels.

CONDITIONNEMENT

REF : MED100

Pack de 100 lingettes épaisses 180 x 200mm.
Carton de 6 packs.
Palette de 100 cartons.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée d'utilisation après ouverture : 3 mois.

Consignes de tri : Emballage complet à mettre dans la poubelle de tri (sachet, capot, étiquette).

EAN13: 3615240000054.

Produit biocide TP2 (Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans contact avec les denrées alimentaires).

Produit fabriqué en France.