

	Marque :	
	Classe CE :	I, non stérile
	Durée de vie :	5 ans
	Année de mise sur le marché :	2002 en France
	Code CLADIMED :	F51DA01
	Code CND :	/
	Code GMDN :	34864
	Version :	C
	Date :	17/11/2020

DONNEES PRODUIT

Description

Bande de gaze enduite d'une masse adhésive acrylique.

Caractéristiques

- Haute tolérance cutanée,
- Support tissé rigide, hautement résistant à la traction,
- Utilisation facile,
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, limite le risque de macération,
- Retrait indolore,
- Radio-transparent,
- Protecteur quadrillé avec prédécoupe centrale,
- Formule sans latex, sans phtalates.

Composition

Support : tissu viscosse.

Masse adhésive : polyacrylate.

Élément protecteur : papier siliconé sur une face.

Contrôles des matières premières et des produits finis

✓ Matières premières

Support : Masse surfacique, résistance, épaisseur.

Masse adhésive : Viscosité, extrait sec.

Élément protecteur : Masse, siliconage, épaisseur.

✓ Produits finis

Contrôles quantitatif et qualitatif de la masse adhésive (viscosité, extrait sec),

Contrôle de la perméabilité à l'air,

Contrôle de l'adhésivité.

Conditionnement / Stérilisation

Présentation en boîte unitaire. Produit livré non stérile. Stérilisation possible à l'autoclave sous réserve de validation au préalable du procédé.

Références

Présentations sans vignette de remboursement

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809020656	02107-01	2 m x 15 cm	6	24	
4042809020472	02105-01	10 m x 5 cm	6	24	
4042809020861	02110-01	10 m x 10 cm	6	24	
4042809020892	02111-01	10 m x 15 cm	6	24	
4042809020922	02112-01	10 m x 20 cm	6	18	
4042809020953	02113-01	10 m x 30 cm	6	18	

Présentations avec vignette de remboursement

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809020656	02107-03	2 m x 15 cm	6	24	6316141
4042809020472	02105-06	10 m x 5 cm	6	24	6316129
4042809020861	02110-02	10 m x 10 cm	6	24	6316129
4042809020892	02111-02	10 m x 15 cm	6	24	6316129

CONDITIONS DE STOCKAGE

Dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

Indications

Maintien de pansements de grandes dimensions,
Réalisation de pansements compressifs,
Protection cutanée avant traitement fonctionnel du pied-bot,
Fixation de matériels de soins tels que tubes, drains.

Contre-indications

Sujets sensibilisés aux produits de synthèse.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

Se conformer aux informations disponibles sur l'emballage.

Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser en tension maximale : risque de phlyctènes pouvant s'intensifier, en particulier après inflammation ou œdème post-opératoire,
- Ne pas utiliser d'ammoniums quaternaires pour nettoyer la peau.

Particularités d'utilisation

- Doit être appliqué sur peau ou support sec et propre.
- Pour décoller l'élément protecteur, effectuer une légère traction transversale pour permettre une séparation aisée de la bande adhésive.

Accessoires associés

Pansements ou matériels de soins.

Entretien

Non applicable.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Conforme à la LPPR.

Procédés de destruction

Procédés prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération contrôlée...) ou mise en décharge, selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 02 43 83 24 97 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485