

HydroTac®

Pansement hydrocellulaire

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Référence | Taille ou dimensions |
| 685832 | 10 x 10 cm |
| 685849 | Diamètre 6 cm |



Produit

HydroTac® est un pansement hydrocellulaire en mousse recouvert d'un film en polyuréthane perméable aux gaz, hydrophobe et résistant aux bactéries sur la face supérieure. Le pansement est recouvert d'un film d'hydrogel sur la face en contact avec la plaie.

Selon l'état de la plaie, HydroTac® peut absorber les sécrétions de la plaie, mais également apporter de l'humidité en cas de plaie sèche. Dans tous les cas, le milieu humide ainsi entretenu favorise la cicatrisation de la plaie. Le gel n'adhérant pas à la plaie, le changement du pansement est quasi indolore et sans résidu.

Indications / Classification

HydroTac® est particulièrement indiqué pour le soin des plaies superficielles faiblement à modérément exsudatives durant la phase de granulation et la phase d'épithélialisation.

HydroTac® est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

HydroTac® est composé comme ci-dessous :

- un film élastique et perméable aux gaz en polyuréthane
- une mousse douce et absorbante en polyuréthane
- un gel en contact avec la plaie en polymère de polyurée/polyuréthane contenant du propylène glycol
- un feuillet protecteur

Caractéristiques :

Capacité d'absorption : > 0,4 g/cm²

Pénétration à la vapeur d'eau : > 1000 g/m²/24 h

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Emballé individuellement sous pochette aluminium pelable.

Accompagné d'une notice d'emploi.

| Référence | Taille ou dimensions produit | Nb unités / pochette | Nb pochettes / boîte | Nb boîtes / carton | Nb cartons / palette |
|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 685832 | 10 x 10 cm | 1 | 10 | 4 | 121 |
| 685849 | Diamètre 6 | 1 | 10 | 4 | 209 |



| Référence | Taille ou dimensions produit | Dimensions pochette | Dimensions boîte | Dimensions carton | Dimensions palette |
|-----------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 685832 | 10 x 10 cm | 189 x 168 mm | 174 x 66 x 195 mm | 364 x 207 x 151 mm | 1200 x 800 x 1811 mm |
| 685849 | Diamètre 6 cm | 149 x 128 mm | 134 x 66 x 155 mm | 284 x 167 x 151 mm | 1200 x 800 x 1811 mm |

Stérilisation

Par rayonnement.
Durée de vie : 3 ans.

Précautions d'emploi

Avant de traiter une plaie à cicatrisation difficile, il est nécessaire de consulter un médecin afin qu'il évalue l'état de la plaie et qu'il détermine la cause du retard de cicatrisation. Le traitement par HydroTac ® ne peut en aucun cas se substituer au traitement étiologique du retard de cicatrisation.

HydroTac ® ne doit être utilisé que sous contrôle médical sur les plaies cliniquement infectées, ou les plaies ouvertes laissant apparaître les os, les muscles ou les tendons.

HydroTac ® peut être utilisé sous contrôle médical dans le cas de brûlures du second degré profond et du troisième degré après la mise en oeuvre d'une nécrosectomie et/ou d'un traitement adapté.

Contre-indications

Il est déconseillé d'utiliser HydroTac ® sur les patients présentant une sensibilité connue à l'un des composants.

HydroTac ® ne doit pas être utilisé avec des agents oxydants (par exemple, solution de Dakin ou eau oxygénée), car ils risquent d'endommager le pansement.