

- Classement du dispositif : Classe I
 - Durée : Temporaire
 - N°. d'enregistrement Afssaps : FR/CA01/0707792V
 - Code GMDN : 15559
- Règle appliquée (annexe IX)*
- Non - Invasif (règle 1)
 - Non actif chirurgical
 - Non actif médical/théra/diag.

Description générale	Urinal en plastique 1L pour homme avec bouchon	
Pièces jointes	Oui	Photo
Référence lot	Non	
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Oui	Mono patient pendant l'utilisation
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Oui	A l'oxyde d'éthylène et chimique uniquement, pas à air chaud
Autoclavable	Oui	A 130°C
Nettoyage	Oui	Avec une solution n'attaquant pas le polypropylène ou détergent
Substance impropre	Produit attaquant le polypropylène pour l'urinal et le polyéthylène pour le bouchon	
Pièces constitutives	Non	
Matières	Polypropylène pour l'urinal / polyéthylène pour le bouchon	
Contient du Latex	Non	
Rohrs	Certificat de fabrication	
Standard fabrication	S.O	
Étiquetage	Oui	Désignation ; référence , type, quantité, CE, nom sur le carton de 25 pièces
Emballage	Oui	Par sachet plastique unitaire non scellé sans étiquette
Stockage particulier	Non	Sec et propre
Durée d'utilisation	Courte à moyenne	
Marquage sur le DM	Oui	Nom, référence, CE et recyclage
Références	16 200 22C	
Désignation	Urinal homme	
Dimensions Lo x La x H(mm)	300 x 95 x130	
Résistance température (C°)	Max = + 120 Min = - 110	
Epaisseur (mm)	2	
Poids net (g)	151	
Capacité (ml)	1000	
Couleurs	Opaque bouchon vert	
Elasticité (%)	NS	
Taux de reversions de flexibilité	NS	
Tension maximale	NS	
Utilisation	Permet le recueillement des urines de l'homme en position semi-couché si nécessaire	
Mode d'emploi	Prendre un urinal propre (utilisation uni-personnelle) et installer sur la verge. La capacité indiquée n'a pas de caractère de mesure	
Précaution d'emploi	Ce dispositif ne peut être utiliser que par une même personne pendant son utilisation. Ne pas rentrer la verge entièrement dans l'urinal. Ne pas attendre que l'urinal soit plein pour le changer. Bien nettoyer après vidange. Ne doit pas être utilisé par plusieurs personnes en même temps.	
Recyclage/Récupération	Oui/ Dans les bacs de déchets ménagers si nettoyé avant	
DEEE/REACH	Non/oui	
PHTALATES	Non	
Données de sécurités	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	