

Perfuseur Intrafix SafeSet® : la gamme

Libellé	Référence	Spécificité	Conditionnement
Perfuseur Intrafix SafeSet® I.S. Spinlock LP	4063009	Site d'injection (I.S.)	Boîte de 100 unités sous blister individuel (10 sachets de 10 unités)
Perfuseur Intrafix SafeSet® Spinlock SR LP	4063007	-	
Perfuseur Intrafix SafeSet® I.S.+S.C. Spinlock 3V LP	4063008	Site d'injection (I.S.) et robinet 3 voies (S.C.)	
Perfuseur Intrafix SafeSet® S.C. Spinlock SR 3V LP	4063100	Robinet 3 voies (S.C.)	

Mode de stérilisation du perfuseur Intrafix SafeSet® : Oxyde d'éthylène / irradiation
Délai de péremption : 2 ans pour les références 4063007 – 4063008 – 4063100
5 ans pour la référence 4063009

Sources:

- 1. SF2H – Prévention des infections liées cathéters veineux périphériques (R53/55) – Novembre 2005
- 2. SF2H – Prévention des infections liées associées aux chambres à cathéter implantables pour accès veineux (R68/70) – Mars 2012
- 3. Omedit centre. Bonnes pratiques de perfusion : module « bon usage du perfuseur par gravité ». Disponible en ligne sur http://www.omedit-centre.fr/Perfufor-mation_module-2_Le-perfuseur/co/2_le%20perfuseur_web.html

Perfuseur Intrafix SafeSet® – nécessaire à usage unique pour perfusion intraveineuse par gravité
Dispositif médical de Classe I stérile
Certificat CE délivré par TÜV SÜD (0123)
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage
Non inscrit sur la liste des produits remboursables prévue à l'article L165-1 du Code de la Sécurité Sociale

Distribué par :
B. BRAUN MEDICAL SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud – France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par :
B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun Str. 1 | 34212 Melsungen | Germany

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.
Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.
Réf. 301408P_20181022_20220622




Perfuseur Intrafix SafeSet®

Mise en place sur poche Ecoflac®


Perfuseur Intrafix SafeSet®

Perfuseur sécurisé – Mise en place sur poche Ecoflac®


Consulter la notice d'instructions du perfuseur avant utilisation

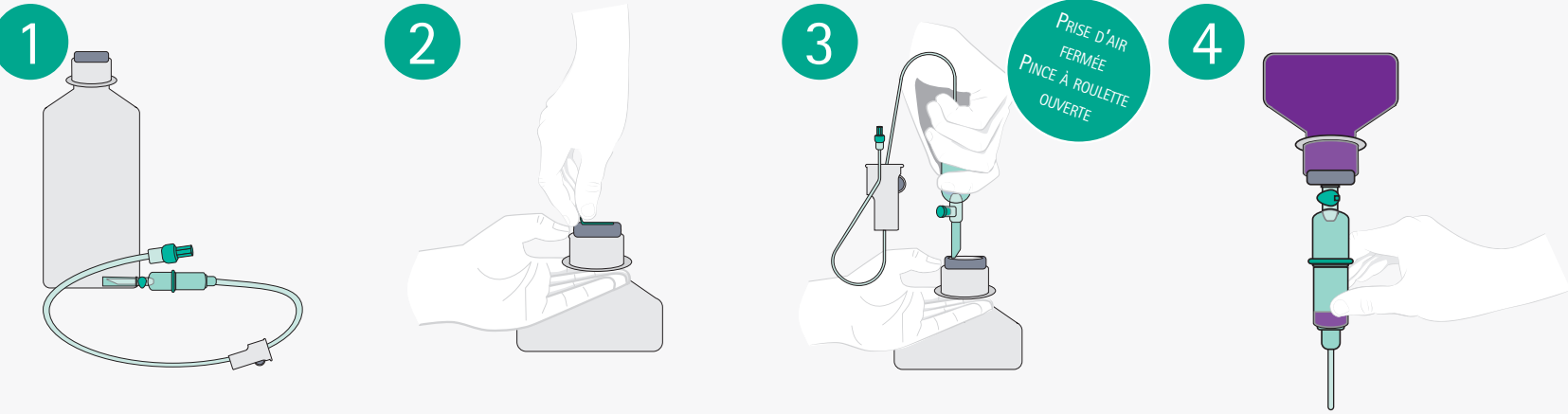

- Vérifier**
- L'intégrité de l'emballage de l'Intrafix Safeset®
 - La présence des capuchons protecteurs aux deux extrémités du perfuseur
 - L'intégrité de la poche Ecoflac® (notamment la présence des languettes en aluminium)
 - Les dates de péremption
- Saisir la coiffe entre l'index et le majeur
 - Retirer une languette aluminium pour découvrir un site sans le toucher
Désinfection selon le protocole en vigueur dans l'établissement
 - Trocarder le site avec le perforateur jusqu'à la garde, sans mouvement de rotation, prise d'air fermée et pince à roulette ouverte
 - Possibilité de fixer la tubulure dans l'ergot prévu à cet effet au niveau de la pince à roulette
 - Fermer la pince à roulette avant de retourner la poche Ecoflac® (aller jusqu'en butée afin de la fermer complètement)
 - Amorcer en appuyant sur la partie souple de la chambre compte-gouttes pour la remplir avec la solution jusqu'à l'anneau vert de préhension

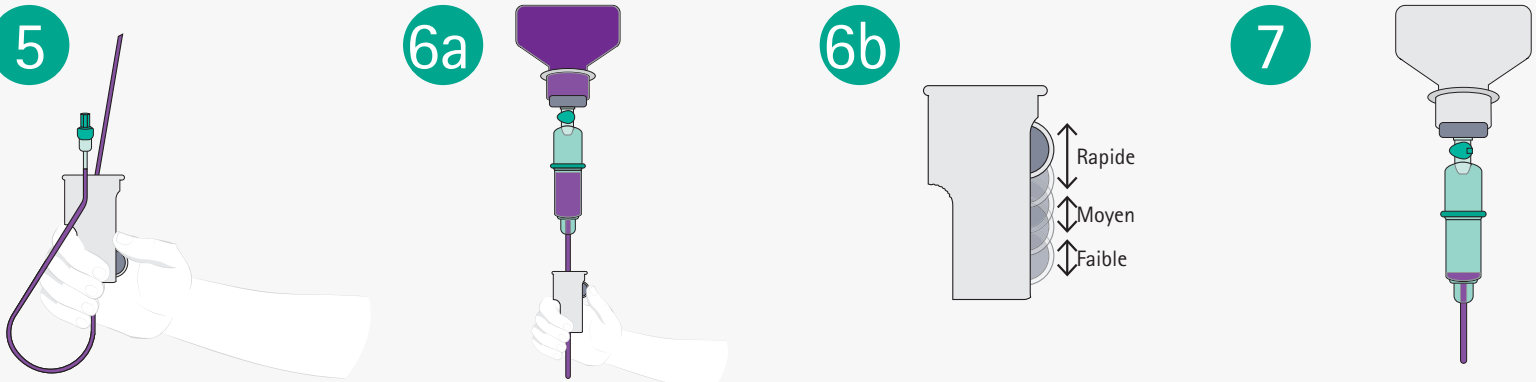

- Purger la tubulure en ouvrant la pince à roulette.
Arrêt automatique de la solution en fin d'amorçage par la membrane hydrophobe de l'embout terminal du perfuseur
 - Fermer la pince à roulette
 - Retirer la tubulure de l'ergot de la pince à roulette
 - Connecter le perfuseur à la voie d'abord
 - Déplacer la pince à roulette et régler le débit (compte-gouttes) en actionnant la roulette vers le haut ou vers le bas (cf 6b)
- Pour ajuster le débit:
- Aller jusqu'en butée pour fermer complètement la pince à roulette
 - Remonter légèrement la roulette pour régler un faible débit
 - Déplacer la pince sur la tubulure lors d'un changement de débit
 - Vérifier le débit par comptage des gouttes 15 ou 30 minutes après le réglage initial
 - Contrôler régulièrement le débit
- ARRÊT AUTOMATIQUE**
de la solution en fin de perfusion*

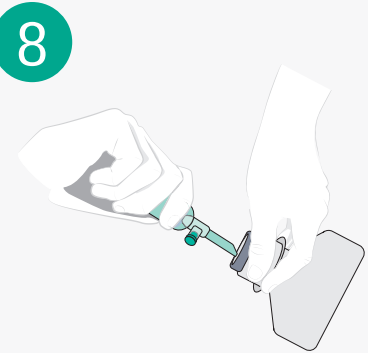

- Pour changer de poche Ecoflac®
- Fermer la pince à roulette
 - Retirer le perfuseur de la poche Ecoflac® vide
 - Ouvrir la pince à roulette
 - Reprendre le protocole à partir de l'étape 2

L'INTRAFIX SAFESET® : RYTHME DE CHANGEMENT			
		Voie veineuse périphérique ^{1,2}	Voie centrale ^{2,3}
Ligne de perfusion par gravité	En continu	Si même médicament 96h	Si même médicament 72h
		A chaque administration de médicaments différents	
	Intermittence	A chaque nouvelle poche ou flacon	
Pour la perfusion de lipides, changer la tubulure au moins toutes les 24h et à chaque nouvelle poche^{1,2}			

*Rappel : les bonnes pratiques de perfusion doivent être respectées (conditions d'aseptie) et notamment la surveillance par le personnel soignant.