


Anti-adhésif GiLBERT



Décolle les pansements | Élimine les traces de masse adhésive

Protocole d'utilisation de l'Anti-adhésif GILBERT en 5 étapes

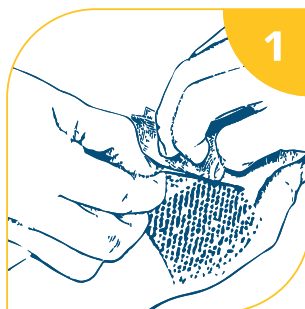

Décoller le pansement à l'aide d'une compresse imbibée d'Anti-adhésif GILBERT. Appliquer la compresse entre la peau et le pansement **sans toucher la plaie** en tirant doucement sur le pansement.




Enlever les résidus d'adhésif en passant doucement la compresse imbibée **tout en évitant plaies et muqueuses**.



Essuyer parfaitement jusqu'à élimination totale du produit sur la peau.



Vérifier que le produit n'a pas coulé (dos, aisselles, zones de pli...). Si besoin, bien rincer à l'eau savonneuse, essuyer et sécher la peau.

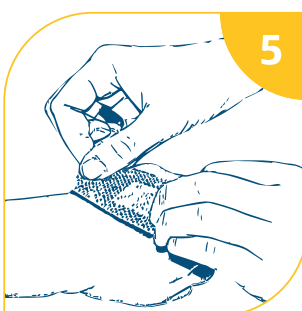

Appliquer un nouveau pansement si besoin.



S'assurer impérativement de l'évaporation et de l'élimination de toute trace du produit à l'aide d'une compresse sèche.

Présentation : Flacon 125 ml PE incassable avec capsule levier, inviolable et indémontable

Anti-adhésif GILBERT

Présentation du produit

Composition qualitative

Alcanes en C11-15, iso

Dipropylène glycol méthyl éther

Propriétés

L'Alcanes en C11-15, iso est un mélange de synthèse d'hydrocarbures légers (entre 11 et 15 carbones par molécules), totalement apolaire et sans structure aromatique. Ce produit se présente sous forme liquide possédant de bonnes propriétés solvantes.

Le dipropylène glycol méthyl éther, est un solvant de synthèse appartenant à la famille des éthers de glycols. A la différence des isoalcanes, c'est un solvant polaire (miscible à l'eau).

L'association de ces deux solvants a permis d'obtenir un produit actif, peu gras et présentant très peu d'odeur. D'autre part, ce produit est non inflammable dans les conditions normales d'utilisation (Point d'ébullition : 188° C, Point éclair : 71° C).

Dans quels cas utiliser ce produit ?

L'Anti-adhésif GILBERT possède des propriétés solvantes. Il est donc indiqué pour :

- Décoller les pansements adhésifs.
- Enlever les résidus de masse adhésive.

Statut du produit

Préparation dangereuse.

Mode d'emploi

USAGE EXTERNE EXCLUSIVEMENT. NE PAS AVALER.

RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LE MODE D'EMPLOI.

Le produit peut être utilisé en remplacement de l'éther pour décoller les pansements adhésifs mais le protocole d'utilisation est différent.

Lors de l'utilisation de l'Anti-adhésif GILBERT en flacon, il est recommandé d'employer une faible quantité de produit, car les propriétés solvantes sont importantes.

L'Anti-adhésif GILBERT est beaucoup moins volatil que l'éther. Il faut donc, après toute application, ESSUYER IMPÉRATIVEMENT ET SOIGNEUSEMENT LA PEAU avec une compresse sèche pour enlever toute trace du produit. Il faut veiller également à ce que le produit n'ait pas coulé dans des zones de plis (aisselles, sous le sein), dans le dos... Si tel est le cas, bien rincer à l'eau savonneuse, essuyer et sécher la peau.

Précautions d'emploi et contre-indications

- NE PAS AVALER • USAGE EXTERNE
- Ne pas appliquer sur les plaies, les peaux lésées (ex. après-rasage...), les muqueuses.
- Ne pas mettre en contact avec les yeux.
- Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 36 mois.
- À utiliser avec précaution chez la personne âgée.
- Ne pas laisser de linge souillé par le produit en contact avec la peau.

- Pour une utilisation avant une pose d'électrodes ou plaques de bistouri électrique, s'assurer impérativement de l'évaporation et de l'élimination de toute trace du produit à l'aide d'une compresse sèche.
- Ne pas mélanger avec tout autre produit sans avoir au préalable rincé la peau à l'eau savonneuse et séché.
- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Classification

DANGER

Contient : Alcanes en C11-15, iso.



Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu et / ou son récipient à travers le système de collecte sélective activé dans votre commune.

Utilisation du produit chez l'enfant

Comme tout produit de ce type (solvant) et compte tenu de l'extrême finesse et sensibilité de la peau des enfants, il est préférable d'utiliser le produit avec précaution sur de petites surfaces et d'éviter impérativement les plis cutanés.

LE NON RESPECT DU MODE D'UTILISATION ET DES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI PEUT ENTRAÎNER DES EFFETS INDÉSIRABLES DE TYPE BRÛLURE.

Conservation du produit

Après ouverture, et selon essai de simulation d'utilisation, l'Anti-adhésif GILBERT en flacon de 125 ml ne présente aucune contamination microbiologique après quatre semaines d'utilisation simulées.

Les avantages de l'Anti-adhésif GILBERT

- Le produit, conditionné en flacon 125 ml, est en polyéthylène incassable, avec capsule levier pour une facilité d'emploi, capsule inviolable et indémontable pour une sécurité et une qualité optimales.
- Produit non inflammable.
- Odeur faible caractéristique.
- Décolle les pansements.



LABORATOIRES
GILBERT

La santé commence avec vous