

Poche à urine stérile 1500 ml  
(poche de nuit / poche de jambe)

**Conveen®**

Attache de jambe

**Conveen®**

Porte-poche



## Mode d'emploi

23323683 Version 5

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2020-09-23

## Destination

La poche à urine est destinée à recueillir passivement l'urine.

## Indications

Les poches à urine sont indiquées pour des patients qui souffrent d'incontinence urinaire ou de rétention de causes diverses.

## Avertissements

La réutilisation de ce produit à usage unique n'est pas recommandée, une contamination croisée pourrait se produire.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et/ou la stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommages corporels ou d'infection chez l'utilisateur.

## Mises en garde

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé, car la stérilité du produit peut être compromise.

## Informations

La poche est conçue pour un usage unique.

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (OE).

La poche a une capacité de 1500 ml.

L'indicateur de volume imprimé n'est qu'une échelle de mesure volumétrique indicative.

Les attaches peuvent être lavées à une température max de 40°C/104°F.

La poche est conçue pour être utilisée à la fois comme une poche de nuit au lit et pendant le sommeil, et comme une poche de jambe hors du lit et en mouvement.

Cette poche est conçue pour être utilisée avec des sondes à demeure ou avec des sondes urinaires intermittentes, alternativement avec un étui pénien. La poche peut être également raccordée à une autre poche de collecte d'urine afin d'augmenter la capacité du système.

Il n'est pas nécessaire d'enlever ce dispositif avant une IRM, car il est compatible.

Le produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel, cependant une contamination rare peut se produire par des quantités infimes de latex de caoutchouc naturel durant la fabrication ou l'emballage.

Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi du produit dans des conditions non conformes aux instructions de la notice d'utilisation.


## Nombre maximum de réutilisations autorisées

Le nombre maximum de réutilisations autorisées pour le porte-poche est d'une utilisation par jour pendant 5 ans.

Les attaches doivent être remplacées quand elles commencent à perdre leur élasticité.


## Utilisation

### Préparation

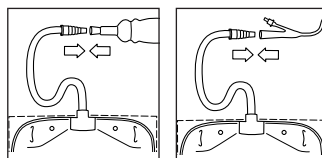


La poche combi peut être raccordée à un étui pénien ou à une sonde à demeure et être accrochée à côté du lit pour le drainage, au lit et pendant le sommeil.

Elle peut également être portée sur la jambe pour un drainage hors du lit et en mouvement.

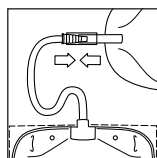

La poche peut être utilisée pour augmenter la capacité d'une autre poche de jambe au lit et pendant le sommeil. Raccordez-la au robinet de la poche de jambe et accrochez-la à côté du lit.

Pour un raccordement de nuit, la poche de jambe doit être équipée d'un tube de sortie flexible auquel peut être fixé le connecteur d'entrée de la poche.

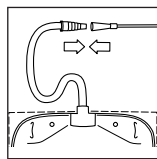


### Sondage intermittent

La poche peut également être raccordée à une sonde pour sondage urinaire intermittent afin de recueillir l'urine pendant le sondage intermittent.




La poche a une tubulure d'entrée. Lorsqu'elle est utilisée comme poche de jambe, la longueur de la tubulure détermine où la poche peut être placée sur la jambe.

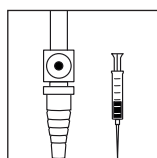


La poche est pourvue d'un site de prélèvement qui permet de pratiquer un prélèvement d'urine si nécessaire.

Utiliser une seringue avec aiguille.

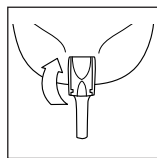

Vérifier que le robinet de vidange est fermé.

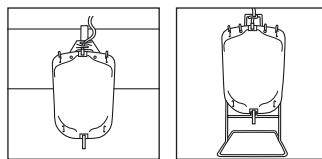


Lorsqu'elle est utilisée comme poche de nuit, utilisez le Conveen porte-poche de lit et de sol pour suspendre la poche de nuit.

Suspendre solidement la poche sur le porte-poche (de lit ou de sol) en insérant les crochets dans les fentes en haut de la poche. Fixer le porte-poche de lit sur le côté de lit ou placer le porte-poche de sol sur le sol près du lit.

Pour assurer une évacuation optimale, il est important que la poche de recueil de nuit soit placée plus bas que vous quand vous êtes couché(e) dans le lit.

### Sondage intermittent

Suspendre ou placer la poche à l'endroit que vous trouvez le plus pratique, en vous assurant qu'elle est placée plus bas que votre bassin, selon que vous préférez vous sonder assis(e), debout ou couché(e).

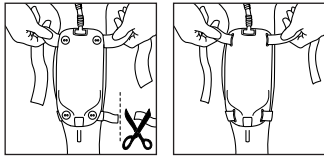


Lorsqu'elle est utilisée comme poche de jambe, attachez les attaches Conveen à la poche.

Ajustez la poche à votre jambe. Toute attache supplémentaire peut être coupée.

### Conveen attache siliconée

Utilisez l'attache de jambe la plus longue placée en haut de la poche. Si vous ajustez la poche à votre mollet, attachez l'attache de jambe supérieure en forme de huit derrière et au-dessus du genou.


### Application

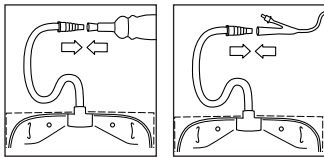


Si le connecteur est équipé d'un bouchon de protection, retirez-le.

Raccorder le connecteur à l'étui pénien ou à la sonde à demeure.

Vous pouvez également relier fermement le connecteur à la tubulure de vidange de la poche de jambe. Ouvrez le robinet de vidange de la poche de jambe.

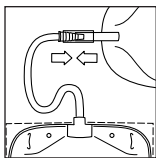


Le système de recueil d'urine est désormais fonctionnel.

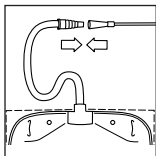

### Sondage intermittent

Raccorder le connecteur à la sonde pour sondage intermittent.

Quand vous commencez l'autosondage, l'urine s'évacue dans la poche de vidange de nuit.

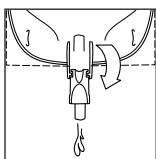

Il est recommandé de vider la poche lorsqu'elle est remplie à un peu plus de la moitié afin de garantir une évacuation optimale.

### Sondage intermittent

Videz la poche après chaque sondage.

### Retrait

Déconnectez la poche de nuit de l'étui pénien ou de la sonde.

Si la poche est reliée à une autre poche de jambe pour une capacité de drainage supplémentaire, fermez le robinet de vidange sans toucher l'extrémité ouverte du tube de sortie. Puis déconnectez les poches.


Lorsqu'elle est utilisée comme poche de jambe, détachez les attaches et retirez la poche de votre jambe.

Lorsqu'elle est utilisée comme poche de nuit, détachez la poche du porte-poche de lit et de sol.

### Sondage intermittent

Après avoir terminé le sondage, déconnectez la poche de la sonde pour sondage urinaire intermittent.

### Élimination

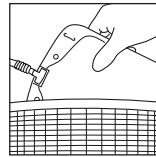

Changez la poche selon les directives et les recommandations locales.

Les attaches et le porte-poche de lit et de sol peuvent être réutilisés.

Vider la poche avant de la mettre à la poubelle.

Le produit est destiné à un usage unique exclusivement et doit être éliminé conformément aux directives locales, par exemple avec les déchets ménagers.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

### Signalement des incidents

Si un incident grave s'est produit au cours de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, veuillez le signaler au fabricant et aux autorités nationales compétentes.

### Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit est conforme à la législation européenne concernant les dispositifs médicaux



Référence catalogue



Date de péremption (AAAA-MM-JJ)



Numéro de lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Ne pas réutiliser



Stérilisé à l'oxyde d'éthylène



Emballage unitaire stérile



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi



Présente un code-barres qui contient le numéro d'identification unique du dispositif



(Global Trade Item Number) Code article international



Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel



Compatible IRM



Conserver à l'abri de la lumière



Emballage recyclable