

FICHE TECHNIQUE

Bandelettes Multistix 10 SG

Les bandelettes Multistix 10 SG sont un outil d'aide au diagnostic très pratique et fiable.

Elles permettent sur place et en quelques instants de détecter dans l'urine, grâce à un code couleur sur l'emballage, la présence des paramètres suivants simultanément : Glucose, Bilirubine, Corps cétoniques, Densité, Sang, PH, Protéines, urobilinogène, Nitrites, Leucocytes estérases

Composition : Glucose : 2.2 % p/p glucose-oxydase (1.3 UI), 1 % p/p peroxydase 3300 UI), 8.1 % p/p iodure de potassium, 69.8 % p/p tampon. Corps cétoniques : 7.1 % p/p nitroprussiate de sodium, 92.9 % p/p tampon.

Sang : 6.8 % p/p dihydroperoxyde de diisopropylbenzène, 4 % p/p tétraméthyl-3,3,5,5'-benzidine, 48 % p/p tampon, 41.2 % p/p.

SG : 2.8 % p/p bleu de bromothymol, 68.8 % p/p polymères (d'anhydride methyl vinyl ether maleique), 28.4 % p/p d'hydroxide de sodium. Protéines : 0.3 % p/p bleu de tétrabromophénol, 97.3 % p/p tampon, 2.4 % p/p excipients.

Leucocytes : 0.4 % p/p dérivé ester amino pyrrolique, 0.2 % p/p sel de diazonium, 40.9 % p/p tampon, 58.5 % p/p excipients.

Nitrites : 1.4 % p/p acide para-arsanilique, 1.3 % p/p tétrahydro-1,2,3,4 benzoquinoléinol-3, 10.8 % p/p tampon, 86.5 % p/p excipients.



Dimensions, grammage et conditionnements

Conditionnements

Boîte de 100 bandelettes

Mode d'emploi

Recueillir l'urine dans un récipient médicalement propre et sec. Tremper la bandelette et la retirer immédiatement. Les résultats sont interprétables au bout de 2 minutes avec l'échelle de couleur sur l'emballage.

Précaution d'utilisation

Conserver à une température inférieure à 30°C et à l'abri du soleil.

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-
medical.com

SAS FM MEDICAL

5003F Bd de la
Fossé 11, 62160
Grenay, FRANCE