



INDICATIONS

Retrait des pansements adhésifs et nettoyage des résidus d'adhésifs acryliques, hydrocolloïdes ou à base de latex.

DESCRIPTION

Solvant liquide en flacon ou lingette imprégnée, destiné à faciliter le retrait indolore des pansements adhésifs et à nettoyer la peau des résidus laissés par les sparadraps ou autres dispositifs médicaux adhésifs.

REMOVE diminue le traumatisme causé lors du retrait des dispositifs médicaux adhésifs et des résidus adhésifs et à rendre moins douloureux le changement de pansement.

Il contient de l'*Aloe vera* pour préserver l'hygrométrie des peaux fragiles. L'*aloe vera* apaise et hydrate la peau sans la graisser.

COMPOSITION DU PRODUIT

Absence de latex, colophane, phtalate (DEHP), chlorofluorocarbures (CFC) et PVC :

Flacon :

Ether monométhyle de dipropylène glycol (CAS 34590-94-8)
Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) (CAS 64742-48-9)
Extrait d'*Aloe vera* (CAS 85507-69-3)
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0)
Parfums

Lingettes :

Support non-tissé de viscose et rayonne imprégné de :
Ether monométhyle de dipropylène glycol (CAS 34590-94-8)
Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) (CAS 64742-48-9)
Extrait d'*Aloe vera* (CAS 85507-69-3)
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0)
Parfums

La quantité de solvant contenue dans chaque lingette est de 2ml.

COMPOSITION DU CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Absence de latex, métaux lourds et PVC.

Flacon : polyéthylène haute densité (HDPE).

Lingettes : polyéthylène et surlyn (résine à base de copolymères d'acide éthylène).

MODE D'EMPLOI

Passer la lingette sur les bords du sparadrap ou du pansement à décoller. Presser doucement la lingette de façon à ce que le liquide coule entre la peau et l'adhésif. Ensuite, nettoyer la peau à l'eau et sécher.

CONTRE-INDICATION

A ne pas utiliser sur des bébés de moins d'un (1) mois nés à terme ou avant terme.

AVERTISSEMENTS/PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Suivre rigoureusement le mode d'emploi.
- Usage externe uniquement.
- Limiter l'exposition au site d'application.
- Eviter d'utiliser sur des enfants de moins de 12 ans car cela peut provoquer une irritation.
- Ne pas appliquer sur les plaies ouvertes ou les muqueuses.
- Eviter tout contact avec les yeux.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Inflammable.
- Utiliser dans un endroit bien ventilé et éviter son utilisation à proximité des flammes et des sources d'ignition. Ne pas inhaler les vapeurs.
- Eviter tout contact avec des surfaces peintes ou vernies.

CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE

- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et demander un avis médical. Rincer la bouche avec de l'eau seulement si la personne est consciente.
- En cas d'inhalation, transporter le patient à l'air libre et appeler un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées et consulter immédiatement un ophtalmologiste.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

pH du produit : - 3,8

Durée de vie : - Flacon : 5 ans
- Lingettes imprégnées de solvant : 5 ans

Conditions de stockage : Dans un endroit sec et ventilé, à l'abri de la chaleur (< 25°C) et de toute source d'ignition (inflammable).

REMOVE[◇]
Solvant pour adhésifs médicaux

PRESENTATIONS COMMERCIALES

Hôpital :

Code produit	Présentation	Unité de commande	Carton standard
59403325	Flacon 237 ml	1 flacon	12 flacons
59403125	Lingettes imprégnées de solvant	1 boîte de 50 sachets	20 boîtes

Pharmacie :

Code produit	Présentation	Code EAN 13	Unité de commande
59403125	Lingettes imprégnées de solvant	0040565120294	1 boîte de 50 sachets

FABRICANT

Smith & Nephew Medical Limited

101 Hessle Road,
Hull - HU3 2BN
Angleterre

DISTRIBUTEUR

Smith & Nephew S.A.S

40/52 Boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
France